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


Återförsäljare:



UniVox® Listener
Slingmottagare och testinstrument

Bruksanvisning

Felsökning och service

Kontrollera att Listener är påslagen (röd lysdiod blinkar). Om lysdioden ej blinkar, kontrollera att batterierna är rätt isatta och byt vid behov ut dem mot nya.

Om ljudet är svagt vid slingmottagning, se till att Listener hänger/hålls i vertikalt läge. Justera vid behov volymen. Svag volym kan tyda på att slinganläggningen ej ger normenligt magnetfält.

Om du inte får Listener att fungera, bör du lämna in den till försäljningsstället. Om du köpt den direkt av oss sänder du den till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Bifoga felorsak, namn, adress och telefonnummer samt kvitto eller faktura.

Miljö

Släng förbrukad produkt/batterier enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo EDIN AB är anslutna till REPA och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tekniska data

Känslighet vid full uteffekt: 25mA/m
Strömförbrukning: 4-10mA beroende på användningssätt
Drift: 2 st AAA/LR3 1,5V batterier (medföljer)



Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörselprodukter. Företaget grundades 1965 och i dag består produktsortimentet av både egenutvecklade produkter (UniVox) och produkter från andra företag. För att säkerställa en hög kvalitet genomgår alla produkter noggranna tester. Ca hälften av försäljningen går på export.

Bo EDIN AB
Stockby Hantverksby 3
181 75 LIDINGÖ

Gatuadress
Förrådsvägen 2B
181 41 LIDINGÖ

Telefon
08-7671818
Telefax
08-7671820

E-post
info@edin.se
Hemsida
www.edin.se

UniVox Listener

UniVox Listener är en bekväm slingmottagare, ett litet, smidigt testinstrument och en enkel samtalsförstärkare - tre funktioner i ett och samma skal. Som slingmottagare används Listener för att lyssna på ljudet från en hörslinga, antingen via den inbyggda högtalaren eller via en hörtelefon. När man använder Listener som ett testinstrument kan man kontrollera om en hörslinga fungerar och uppfyller grundläggande krav på signalstyrka. Till sist fungerar även Listener som en enkel samtalsförstärkare som gör det möjligt för personer med hörselnedsättning att bättre höra vad som sägs i miljöer med bakgrundsstörning.

Tack för att du valt en UniVox-produkt. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd!



Beställningsdata och tillbehör

230450 UniVox Listener, Slingmottagare/testinstrument
230453 UniVox Listener, Slingmottagare/testinstrument, inkl hörtelefon 239005
239005 Hörtelefon, 3,5mm hane stereo
239020 Hörtelefon AKG K71TV, med volymkontroller, 3,5mm hane stereo
581407 Enkelsidig hörsnäcka, utanpåliggande, 3,5mm hane stereo

Funktioner, knappar och reglage

Listeners knappar och reglage är placerade så att de viktigaste, on/off och volym, är placerade på produktens högersida om du håller Listener med ett enhandsgrepp i din högra hand, medan omkopplaren för mikrofon-/T-läge samt tonkontrollen bäst regleras med Listener i vänster hand.

UniVox Listener - översikt knappar och reglage



Använd Listener som slingmottagare

Sätt på Listener med on/off-omkopplaren. När Listener är på blinkar den röda lysdioden på Listeners framsida. För att kunna lyssna på ljudet från en teleslinga måste omkopplaren på vänster sida vara i läge "T". Den inbyggda mikrofonen är då urkopplad och ljudet kan höras i antingen den inbyggda högtalaren eller i en separat hörlur eller hörsnäcka med 3,5mm stereoprop (se första sidan) som ansluts i uttaget på Listeners undersida.

Häng Listener runt halsen och se till att den hänger vertikalt hela tiden. Reglera volymen med volymkontrollen på höger sida samt ljudets bas-/diskantförhållande med tonkontrollen på vänster sida. Hängande runt halsen på en man av normallängd hänger Listener ca 120 cm över golvet, d.v.s. samma avstånd som en hörapparat befinner sig på när användaren sitter på en stol. Det är därför både lätt och bekvämt att gå omkring och lyssna på slingan inom det område som är aktuellt.

Använd Listener som testinstrument

Sätt på Listener med on/off-reglaget. När Listener är på blinkar den röda lysdioden på Listeners framsida. För att använda Listener som testinstrument måste omkopplaren på vänster sida vara i läge "T". Den inbyggda T-spolen är då aktiverad medan den inbyggda mikrofonen är urkopplad.

På Listeners framsida finns en lysdiod som tänds med ett blått ljus då magnetfältet uppnår 200mA/m. Detta värde motsvarar -6dB enligt den nya IEC-normen och visar att slingan fungerar tillfredsställande. För att mer exakt mäta magnetfältets nivå samt genomföra andra viktiga mätningar (t.ex. av bakgrundsstörning och frekvensgång) måste ett professionellt mätinstrument användas, t.ex. UniVox FSM.

Det kan vara svårt att se lysdioden om man bär Listener i bandet runt halsen. Vi rekommenderar därför att hålla Listener i ena handen på den höjd där du önskar testa slingans magnetfält. En hörapparat befinner sig på ca 120 cm avstånd från golvet när användaren sitter på en stol. För stående åhörare brukar man räkna med att hörapparaten befinner sig ca 160-170 cm över golvet. Vid test av hörslingans magnetfält skall Listener därför hållas på dessa avstånd från golvet.

OBS! För att Listener skall ta emot signalen maximalt måste den hållas vertikalt. Om Listener vinklas i förhållande till golvet blir den mottagna signalen svagare.

Använd Listener som samtalsförstärkare

Sätt på Listener med on/off-reglaget. När Listener är på blinkar den röda lysdioden på Listeners framsida. För att använda Listener som samtalsförstärkare måste omkopplaren på vänster sida vara i läge "M". Listeners T-spole är då inaktiverad medan den inbyggda mikrofonen är inkopplad. Den inbyggda högtalaren är också inaktiverad vilket gör att man måste koppla in en hörlur eller hörsnäcka med 3,5mm stereoprop (se första sidan) som ansluts i uttaget på Listeners undersida.

Bästa resultat får man om Listener riktas mot den som talar. Reglera volymen med volymkontrollen på höger sida samt ljudets bas-/diskantförhållande med tonkontrollen på vänster sida.

Underhåll

UniVox Listener kräver normalt sett inget underhåll. Om den skulle bli smutsig, torka av den med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.