



Innehåll

| | |
|---|----|
| Introduktion | 3 |
| Grundläggande säkerhetsinformation | 4 |
| Översikt | 5 |
| Mottagare (i laddstationen)..... | 5 |
| Sändare..... | 5 |
| Koppla in EchoLink Universal sändare..... | 6 |
| Använda EchoLink..... | 7 |
| Byte av batterier | 7 |
| Tillbehör..... | 8 |
| Underhåll, skötsel och garanti..... | 8 |
| Teknisk information och service | 9 |
| Miljö och återvinning..... | 9 |
| Noteringar..... | 10 |

Introduktion

Tack för att du valt att köpa EchoLink Universal IR-set. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

EchoLink Universal IR-set är en produkt som använder infrarött ljus för trådlös överföring av ljud från TV, radio, CD/MP3-spelare eller annan ljudkälla. Ljudet sänds trådlöst vidare från sändaren till mottagaren, till vilken man ansluter hörlurar eller halsslinga. Räckvidden mellan sändare och mottagare är normalt 10m. Hörlurarna ger förbättrad taluppfattbarhet för den som har nedsatt hörsel men ej använder hörapparat och halsslingan används av den som har hörapparat. Hörapparaten ställs i T-läge.

Vänligen läs igenom grundläggande säkerhetsinformation på sidan 3, innan du börjar använda produkten.

Förpackningen innehåller följande delar

- Sändare
- Mottagare
- Laddstation för mottagare
- 2 st nätadapter 12VDC 1,5A (till sändare), 6VDC 1,0A (till laddstation)
- Hörlurar och halsslinga
- 2xRCA – 3,5mm hane kopplingsladd, sladdlängd 1,5m
- Myggmikrofon, sladdlängd 1,5m
- Konverteringskontakt 3,5mm hona till 2xRCA hane
- Konverteringskontakt 3,5mm hane till 2xRCA hona
- Konverteringskontakt 2xRCA till SCART

Grundläggande säkerhetsinformation

- Långvarigt lyssnande på för hög nivå kan skada din hörsel.
- När du ansluter EchoLink till TVn eller annan ljudkälla är det viktigt att kontrollera att alla kontakter är ordentligt isatta och att volymen på mottagaren är ställd på lägsta nivå när du påbörjar lyssnande.
- Följ steg-för-steganvisningen när du använder den första gången, så att du lär känna produkten ordentligt.
- Använd inte produkten i en miljö som är fuktig eller onormalt varm eller kall.
- Använd endast medföljande nätadapterar.
- Placera sändare och laddstation så att de inte riskerar att falla till golvet.
- Produkten kan bli varm under användning, så försäkra dig om att det finns tillräckligt med ventilation runt produkten och att inga brännbara föremål ligger mot produkten.
- Service av produkten får endast utföras av behörig personal.
- Mottagaren skall laddas 24 timmar innan EchoLink används första gången.
OBS! Batterierna uppnår full kapacitet, ca 30 timmars drifttid, efter 5-7 användningar och uppladdningar.

Översikt

Mottagare (i laddstationen)



Laddstationens baksida



Sändare



Koppla in EchoLink Universal sändare

1. Placera sändaren vid/på TVn (eller annan ljudkälla du vill använda). Tänk på att placera den så att den inte riskerar att falla till golvet. Om du vill sätta fast sändaren med medföljande kardborreband skall sändarens fot tas bort genom att dra isär sändaren från foten. Fäst sedan ena delen av kardborrebandet under sändaren och den andra på TV-apparaten.
OBS! Det måste vara "fri sikt" mellan sändaren och den plats där du sitter när du tittar på TV, se punkt 2.
2. Sändarens framsida skall riktas mot den plats där du sitter när du tittar på TV/lyssnar på ljudet från annan ljudkälla (CD-spelare el. dyl.).
Observera att ljudet kan försämmas/försvinna om något befinner sig mellan sändaren och din lyssningsplats.
3. Anslut sändaren till TVn, eller den ljudkälla du valt, med kopplingsladden (AUDIO INPUT på sändaren). Om du inte har en 3,5mm audioutgång på TVn (annan vald ljudkälla) kan du använda anpassningssladden till 2xRCA (phono), ev. kompletterat med medföljande konverteringskontakt 2xRCA till SCART om din TV har ett SCART-uttag.
4. Om du inte hittar något lämpligt uttag på din TV (eller annan vald ljudkälla) kan du använda den medföljande mikrofonen och placera den på TVns högtalare med hjälp av kardborrebandet, som följer med i förpackningen. Anslut mikrofonen till mikrofoningången (MIC IN) på sändaren.
5. Anslut nätadaptern 12VDC till sändaren (DC12-15V, 200mA) och vägguttaget. Fyra lysdioder tänds på sändarens framsida.
6. Anslut nätadaptern 6VDC till mottagarens laddstation och vägguttaget. När laddstationen är ansluten till vägguttaget lyser lysdioden POWER rött.
7. Kontrollera att mottagaren är avstängd genom att föra volymhjulet moturs till läge 0 och lysdioden vid ON/OFF slocknar. Placera därefter mottagaren i laddstationen. Under laddning lyser lysdioden för laddning (CHARGE) rött. När mottagaren är fulladdad övergår lysdioden till grönt sken. Nu är EchoLink klar att användas.

Använda EchoLink

1. **OBS!** När du skall använda mottagaren är det viktigt att du alltid startar på en låg ljudnivå, läge 0.
2. Anslut hörlurarna/halsslingan till mottagaren.
3. Placera mottagaren så att sidan med det tryckta EchoLink riktas mot sändaren. Det är viktigt att det inte finns några föremål mellan sändare och mottagare.
4. Slå på TVn (annan vald ljudkälla) och sätt på dig hörlurarna/halsslingan. Glöm inte att ställa hörapparaten i T-läge om du använder halsslingan. Öka volymen successivt på mottagaren, så att du erhåller en behaglig lyssningsnivå.
5. Ljudet finjusteras med tonkontrollen som sitter nedanför volymkontrollen (H-M-L).
6. Du kan välja mellan att lyssna i mono eller stereo. Omkopplingsknappen (MONO/STEREO) sitter på baksidan av sändaren.
7. Stäng av mottagaren när du lyssnat klart och placera den i laddstationen. Den gröna lysdioden märkt "charge" övergår till rött sken när laddning pågår. När mottagaren är fulladdad övergår dioden till grönt.
8. Mottagaren kan också laddas genom att ansluta nätadaptern 6VDC direkt i mottagarens undersida.
9. När batterinivån är låg blinkar lysdioden ON/OFF med ett rött sken. Efter några minuter slås mottagaren av automatiskt för att skydda batterierna. Stäng av mottagaren och ladda den genast om detta inträffar.

Byte av batterier

Batteribyte i mottagaren får endast utföras av fackman. Lämna in mottagaren till inköpsstället för batteribyte.

Tillbehör

| | |
|--------|--|
| 250451 | EchoLink Universal IR-set, enbart hörlurar |
| 250452 | EchoLink Universal IR-set, enbart halsslinga |
| 250453 | EchoLink Universal IR-set, enbart sändare |
| 250454 | EchoLink Universal IR-set, enbart mottagare |
| 250460 | EchoLink Universal IR-set, enbart nätadapter 12VDC till sändare |
| 250461 | EchoLink Universal IR-set, enbart nätadapter 6VDC till mottagarens laddstation |
| 250462 | EchoLink Universal IR-set, enbart mottagarens laddstation |

Underhåll, skötsel och garanti

Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.

Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Utsätt inte systemet för höga temperaturer.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som följer med i förpackningen.

Batteribyte får endast utföras av fackman.

Om produkten blir smutsig, kan den torkas med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen. Bedöm om batterierna behöver bytas, det får endast utföras av fackman. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till REPA och EL-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | www.edin.se | www.horbutiken.se / www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

