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


Återförsäljare:



Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen. Kontrollera om batterierna behöver bytas, se bruksanvisningen på föregående sida.

Vänligen kontakta försäljningsstället om halsslingan trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se.

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo EDIN AB är anslutna till REPA och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



CL iLoop
Halsslinga med förstärkare

Bruksanvisning

CL iLoop (art nr 279001)

Tack för att du har valt att köpa CL iLoop halsslinga. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.



Z:\Products Public\Loop Amplifiers - Systems\Loops\iLoop\Swedish\Service\iLoop_DuSeV2_091001.indd Copyright © Bo EDIN AB

Inledning

CL iLoop är en halsslinga för hörapparatbärare med inbyggd förstärkare för användning med MP3-spelare, CD-spelare, persondator eller annan ljudkälla med 3,5mm ljudutgång. Halsslingan används med hörapparaten inkopplad i T eller MT-läge och kan därför användas ihop med de flesta hörapparater.

Översikt CL iLoop



iLoop



Tryck knappen åt vänster för att öppna batterilocket

Bruksanvisning

1. Sätt i 2 AAA/LR3 1,5V batterier, så som skissen i botten på batterifacket visar.
2. Sätt i kontakten från halsslingan i uttaget för hörlurar på din ljudutrustning.
3. Trä halsslingan över huvudet.
4. Koppla sedan hörapparaten i T- eller MT-läge. Aktivera halsslingan genom att trycka på den grå ovala ON/OFF knappen, som sitter på halsslingans framsida. Den gröna lampan i halsslingans övre kant tänds.*)
5. Justera volymen med den svarta rullknappen som sitter nertill på halsslingans dosa.
6. Tryck på ON/OFF knappen för att stänga av halsslingan, varvid den gröna lampan slocknar.

OBS!

Stäng av halsslingan före byte av batterier. Släng inte använda batterier i hushållssoporna, utan lämna dem till batteriinsamlingen.

*) Om lampan lyser rött när halsslingan aktiveras, behöver batterierna bytas.

Tillbehör

Batteri, alkaliskt AAA/LR3 1,5V (art nr 175106)

Skötsel, underhåll och garanti

CL iLoop kräver normalt sett inget underhåll. Om den skulle bli smutsig, torka den då med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.