



Univox® DLS-30/DLS-30TV slingförstärkare



Slingkudde



Soffslinga

Art nr Beskrivning

203010	Univox DLS-30, Slingförstärkare med AutoScart, inkl. slingkudde
203010S	Univox DLS-30, Slingförstärkare med AutoScart, inkl. soffslinga
203040	Univox DLS-30TV, Slingförstärkare med AutoScart, TV Sync, inkl. slingkudde
203040S	Univox DLS-30TV, Slingförstärkare med AutoScart, TV Sync, inkl. soffslinga

Innehåll

Inledning	3
Om DLS-30/DLS-30TV	3
Kontrollera före inkoppling med Scart	4
Koppla in Univox® DLS-30/DLS-30TV	5
Justera ljudnivå	6
Indikeringslampor	6
Underhåll och skötsel.....	6
Felsökning.....	6
Service	7
Teknisk information.....	7
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	7
Miljö och återvinning	7
Tillbehör/reservdelar	8

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en Univox® produkt. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Univox® DLS-30/DLS-30TV är ett komplett slingförstärkarpaket för TV och annat ljudlyssnande för hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-läge.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.

Om DLS-30/DLS-30TV

Univox® DLS-30/DLS-30TV har automatisk omkoppling och anslutning till TV via scart och 2 st extra ingångar som kan anslutas till externa mikrofoner eller andra ljudkällor som radio eller MP3-spelare.

Modellen DLS-30TV kan kompensera för det tidsfel i ljudet som "platta" TV-apparater relativt ofta har.

Förpackningen med DLS-30/DLS-30TV innehåller följande delar:

- Slingförstärkare med automatisk scartkontakt
- Slingkudde/soffslinga
- Nätadapter


I förpackningen finns också självhäftande kardborreband, för att fästa DLS-30/DLS-30TV på baksidan av TV-n. Börja med att packa upp delarna.

Kontrollera före inkoppling med Scart


Se först till att TV-n fungerar som den ska tillsammans med video/DVD/digitalbox/satellitmottagare. De apparater som kopplas till TV-n ska vara seriekopplade (se ex. nedan). Om det finns flera scartuttag på TV-n ska scartuttag nr 1 användas. Den mittersta ljudkällan/-orna måste ha två scartuttag.

Vid korrekt ihopkoppling ska bild och ljud i TV-n automatiskt ändras till den ljudkälla du valt. Oavsett vad du vill lyssna på (video, DVD etc.) så ändras ljud och bild i TV-n till ljud och bild från den apparat du valt.


Seriekoppling TV / satellit / digitalbox / DVD med SCART

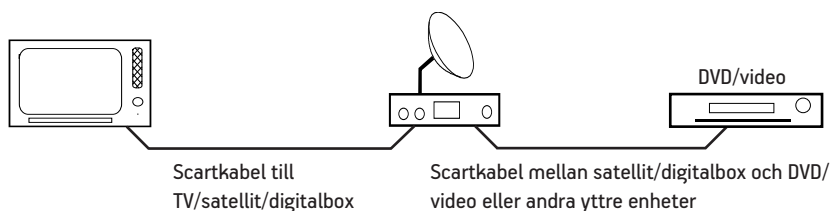

Seriekoppling TV / DLS-30/DLS-30TV / satellit / digitalbox / DVD med SCART

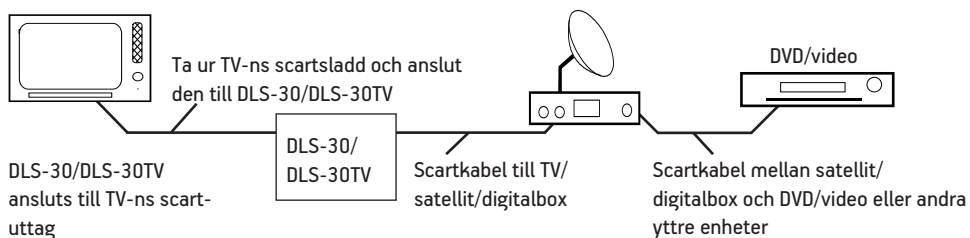

Koppla in Univox® DLS-30/DLS-30TV

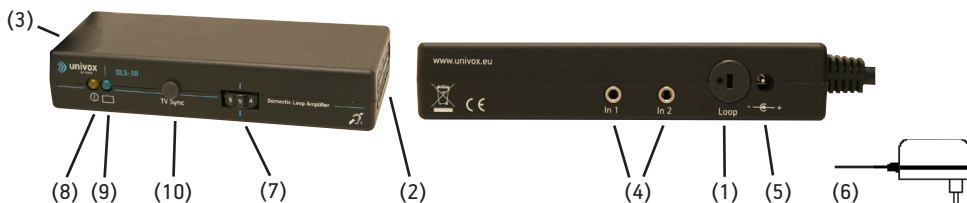

1. Placera slingkudden/soffslingan där du brukar sitta och se på TV. Slingkudden kan läggas antingen på eller under sittdynan i fåtöljen. Soffslingan kan placeras runt soffan/ under mattan.
2. Lägg slingkuddens/soffslingans sladd utmed väggen eller under en matta så att den når fram till förstärkaren, som bör placeras bakom TV-n. Förlängningssladd finns som tillbehör. Tänk på snubbelrisken!
3. Anslut slingkuddens/soffslingans kontakt till uttaget (1) på DLS-30/DLS-30TV.
4. Ta ut scartkontakten från TV-n om du anslutit DVD/video el. dyl. och anslut den till scartuttaget (2) på kortsidan av DLS-30/DLS-30TV.
5. Anslut DLS-30/DLS-30TVs scartkontakt (3) till TV-ns scart 1-uttag.
6. Om TV-n saknar scartuttag, anslut en sladd, t. ex. RCA-kabel, från TV-ns audioutgång till valfri IN-ingång (4) på DLS-30/DLS-30TV.
7. Ett tredje sätt att få ut TV-ns ljud till DLS-30/DLS-30TV är att koppla in elektretmikrofon 13A (tillbehör) till valfri IN-ingång (4). Mikrofonen fäster du på TV-ns högtalare. Oavsett ljudkälla kommer då rätt ljud ut på slingan.
8. Anslut nätadaptern (6) till förstärkarens uttag märkt "12V AC" (5).
9. Anslut nätadaptern (6) till vägguttaget. Den blå lampan (9) lyser upp med ett fast sken en kort stund (se vidare nedan under rubriken indikeringslampor).
10. Om ljud och bild inte är synkroniserade så kan du justera detta med kontrollen "TV sync" (10). Denna finns enbart på DLS-30TV.

Om du vill kan du sätta fast förstärkaren på baksidan av TV-n med hjälp av det självhäftande kardborreband som följer med i förpackningen.

Ställ hörapparaten i T- eller MT-läge när du tittar på TV.

Justera ljudnivå

Vid behov kan du justera ljudnivån med nivåkontrollen (7) på framsidan av förstärkaren. Detta behöver du normalt bara göra en gång eftersom DLS-30/DLS-30TV är försedd med automatisk volymkontroll. Reklamslag kan ibland låta högre vilket är helt normalt.

Indikeringslampor

Indikeringslampor för strömförsörjning (gul lampa, 8) och slinga (blå lampa, 9) finns på framsidan av förstärkaren. Den gula lampan visar att det finns ström till DLS-30/DLS-30TV och den blå visar att slingan fungerar (blinker i takt med ljudkällan).

Underhåll och skötsel

Univox® DLS-30/DLS-30TV kräver normalt inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren lätt fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Montera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

Felsökning

1. Kontrollera först att den gula strömförsörjningslampan (8) lyser. Om den inte lyser, kontrollera att nätadaptern sitter i nätuttaget.
2. Kontrollera att den blå slinglampan (9) blinkar i takt med ljudet från ljudkällan. Om inte: kontrollera att nivåkontrollen (7) är uppskruvad, slingkudden/soffslingan är ansluten (1), ljudkällan är ansluten (3/4). Lyser ändå inte den blå slinglampan kan slingkabeln vara trasig.
3. Glöm inte att sätta hörapparaten i T- eller MT-läge. Om lamporna lyser som de ska, kan det vara fel på hörapparaten.

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Service

Om produkten trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna den till försäljningsstället/audionommottagningen eller sända den till Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö. Märk godset med SERVICE, bifoga kvitto eller faktura, namn, adress och telefonnummer och felbeskrivning.

Teknisk information

Univox® DLS-30/DLS-30TV uppfyller normer och krav i den internationella standarden IEC 60118-4.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk information beställas via support@edin.se.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Bo Edin AB ansvarar inte för störningar från radio eller TV, inte heller för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Tillbehör/reservdelar

Art nr	Beskrivning
283002	Slingkudde
283005	Kuddfodral till slingkudde
283105	Halsslinga inkl. förlängningssladd 10m
283220	Soffslinga inkl. förlängningssladd, 8+10 m
242401	13A, elektretmikrofon med kardborrefäste, kabel 1,8m
581050	Myggmikrofon, 3,5mm hane, kabel 1,1m
241501	13T, tryckzonsmikrofon, elektret, kabel 3m
281005	Förlängningssladd till mikrofon, kabel 3m
281006	Förlängningssladd till mikrofon, kabel 6m
281015	Audiosladd för koppling till stereo, 3,5mm till 2xRCA, kabel 1,5m

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

 **univox**
BY EDIN