

Återförsäljare:



Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det då med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt. Sörj för god ventilation runt klockan, den får ej övertäckas! Var aktsam så att du inte tappar väckaruret i golvet.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Vänligen kontakta försäljningsstället om väckaruret trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information

För teknisk information och gällande deklARATIONER hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produkt databank" på www.edin.se.

2008-05-08 Z:\Products Public\Wakening Devices&Baby Alarm\Sonic Boom SBA475ss analogue\Sonic_Boom_DuSeV1.indd



geemarc **Sonic Boom**

Väckarur med vibrator, akustiskt och optiskt larm


Bruksanvisning

Sonic Boom (art nr 353012)

Tack för att du har valt att köpa Sonic Boom väckarur. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.



Översikt - Sonic Boom

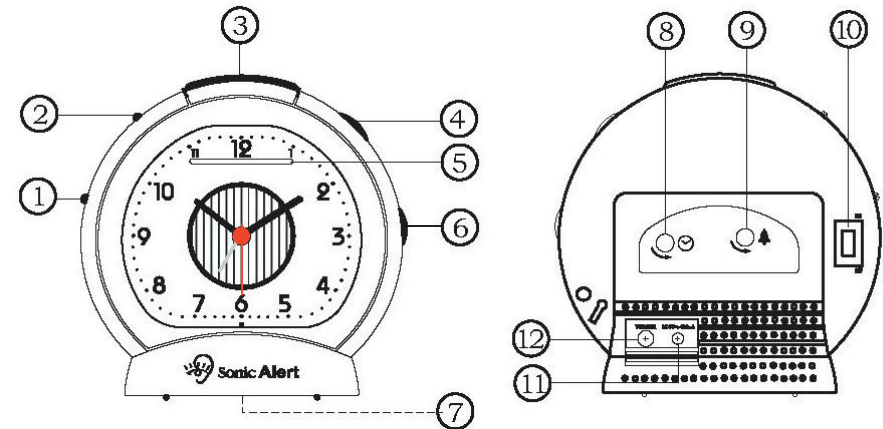

1. Inställning av väckningsfunktion
2. Justering bakgrundsbelysning (stark/svag)
3. Snooze, somna-om-funktion
4. Volymkontroll
5. Optisk indikering
6. Tonkontroll
7. Batterifack
8. Inställning av tid
9. Inställning av väckningstid
10. Bakgrundsbelysning på/av
11. Uttag för batterieliminatör
12. Uttag för vibrator



Nätanslutning

Anslut batterieliminatorm till ingången märkt AC-9V ~ 900mA (11), som är placerad till höger om vibratoringången. Var noggrann med att inte förväxla ingångarna, batterielimatoringången är den mindre av de två.

Använd endast medföljande batterieliminatorm.

Ställ in tid

Vrid tidsratten (8) medurs för att ställa in korrekt tid.

Ställ in väckningstid

Vrid ratten för väckningstid (9) medurs för att ställa in önskad tid för väckning.

Larm

Ställ in önskad väckningsfunktion genom att skjuta inställningsknappen (1) uppåt/ nedåt:

VIB/BUZZ (både vibrator och akustiskt larm)

VIB (endast vibrator)

BUZZ (endast akustiskt larm)

OFF (avstängt larm).

OBS!

Oavsett vilken väckningsfunktion du har valt blinkar den optiska indikeringen och bakgrundsbelysningen vid aktiverat larm till dess att larmet stängs av.

Somna-om-funktion

Om du trycker ned SNOOZE-knappen (3) när larmet aktiveras stängs larmet av och aktiveras igen efter 4 minuter.

Avstängning av larm

Larmet stängs av genom att ställa knappen för väckningsfunktion (1) på OFF.

Volymkontroll

Volymen justeras med rullhjulet VOL (4) på klockans högra sida.

Tonkontroll

Tonen justeras med rullhjulet TONE (6) på klockans högra sida.

Sängvibrator



1. Anslut vibratorm till ingången märkt VIBRATOR (12) på klockans baksida.
2. För att vibratorm skall aktiveras vid larm skall inställningsknappen (1) för väckningsfunktion var inställd på VIB/BUZZ (både vibrator och akustiskt larm) eller VIB (endast vibrator).
3. Placera vibratorm under kudden eller madrassen.

Bakgrundsbelysning

Den blå bakgrundsbelysningen sätts på/stängs av med knappen på baksidan av klockan (10), ON (på) eller OFF (av). När bakgrundsbelysningen är avstängd kan den aktiveras genom att trycka ned SNOOZE-knappen på klockans ovansida (3). Ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen kan justeras med hjälp av inställningsknappen HIGH-LOW på klockans vänstra sida.

Batteribackup

Sätt in ett 1,5V alkaliskt batteri (storlek AA) om du vill ha batteribackup. Batterifacket är placerat under klockan (7). Sätt i batterierna åt det håll som markeringen i botten på batterifacket visar.

OBS!

Bakgrundsbelysning, vibrator och larm fungerar inte under strömavbrottet, men inställningar för tid och larmtid finns kvar när strömmen kommer tillbaka.

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo EDIN AB är anslutna till REPA och El-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör

Alkaline-batteri, AA/LR6 1,5V (art nr 175101)