

Sonic Boom SB200ss

Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm

Bruksanvisning



Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Innehåll


Introduktion	3
Översikt.....	3
Batteribackup (batteri ingår ej)	4
Nätanslutning.....	4
Val av tidsvisning (12/24 timmar)	4
Tidsinställning.....	4
Inställning av väckningstid	5
Inställning av typ av larm	5
"Somna-om-funktion"	5
Avstängning av larm.....	5
Inställning av det akustiska larmets volym och ton	6
Sängvibrator.....	6
Skötsel och underhåll.....	6
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	6
Felsökning	6
Teknisk information och miljö.....	7

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa Sonic Boom SB200ss digitalt väckarur. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Översikt

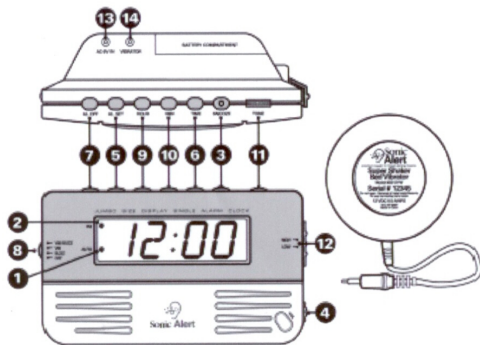

1. Indikering aktiverat larm
2. Indikering tidsvisning (reglage 12h/24h finns på klockans baksida)
3. Snooze (repetition av larm, "somna om-funktion")
4. Volymkontroll
5. Aktivering inställning väckningstid (håll knappen intryckt)
6. Aktivering tidsinställning (håll knappen intryckt)
7. Avstängning larm
8. Inställning typ av larm
9. Inställning klockslag (timmar)
10. Inställning klockslag (minuter)
11. Tonkontroll
12. Reglering bakgrundsbelysning
13. Uttag för nätadapter (9V)
14. Uttag för vibrator

Batteribackup (batteri ingår ej)

Vid strömavbrott hålls klockans tidsinställningar kvar om du sätter in ett batteri i batterifacket på klockans baksida. Klockans larmfunktion fungerar dock ej under strömavbrott och även displayen slocknar. Urverket fortsätter dock att fungera, så när strömmen kommer tillbaka, och displayen åter lyser, så visar klockan rätt tid.

- Öppna batterilocket på klockans baksida genom att skjuta det i pilens riktning
- Sätt in ett alkaliskt batteri enligt illustrationen i botten på batterifacket (9V/6AM6)
- Stäng batterifacket

Nätanslutning

- Anslut nätadaptern till ingången märkt "AC-9V IN" på klockans baksida.
- Anslut nätadaptern till vägguttaget (230V).

Val av tidsvisning (12/24 timmar)

Klockan levereras inställd på 24-timmarsvisning. Visningsformatet kan ändras till 12-timmarsvisning med knappen märkt "HOUR" på klockans baksida.

Tidsinställning

Timmar

Håll nere tidsinställningsknappen (6) "TIME" samtidigt som du trycker på knappen (9) "HOUR" för att ställa in timtid.

Minuter

Håll nere tidsinställningsknappen (6) "TIME" samtidigt som du trycker på knappen (10) "MIN" för att ställa in minuttid.

OBS! Släpp upp tidsinställningsknappen (6) "TIME" sist när du är klar.

Inställning av väckningstid

Timmar

Håll nere tidsinställningsknappen (5) "AL.SET" samtidigt som du trycker på knappen (9) "HOUR" för att ställa in timtid.

Minuter

Håll nere tidsinställningsknappen (5) "AL.SET" samtidigt som du trycker på knappen (10) "MIN" för att ställa in minuttid.

OBS! Släpp upp tidsinställningsknappen (5) "AL.SET" sist när du är klar.

Inställning av typ av larm

Knappen för inställning av larm har fyra lägen:

VIB BUZZ: Vibrator och akustiskt larm

VIB: Vibrator

BUZZ: Akustiskt larm

OFF: Avstängd

"Somna-om-funktion"

Om du trycker ned "SNOOZE" (3) på ovansidan av klockan stängs larmet av och och aktiveras igen efter 9 minuter.

Avstängning av larm

Ställ larminställningsknappen (8) på klockans vänstra sida i läge "OFF" för att stänga av larmet helt eller tryck på knappen (7) "AL.OFF" på klockans ovansida för att klockan skall larma samma tid nästa dygn.

Inställning av det akustiska larmets volym och ton

Använd knappen "VOL" (1) på klockans högra sida för att reglera volymen på det akustiska larmet. Tonen regleras med knappen "TONE" (3).

Sängvibrator

Vibratorn ansluts till ingången (14) "VIBRATOR" på klockans baksida.

- Välj en av larminställningarna som aktiverar vibratorn ("VIB BUZZ" eller "VIB")
- Placera vibratorn under kudden
- När larmet aktiveras vibrerar vibratorn

OBS! Anslut endast medföljande vibrator.

Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det då med en lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. Använd alkaline batterier, för bästa resultat enligt rekommendation från tillverkaren. Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätdapter än den som levereras med produkten.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

Kontrollera att omkopplaren inuti batterifacket är ställd på 60Hz om klockan drar sig mycket.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

OBS! Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Teknisk information och miljö

För teknisk information och gällande deklARATIONER hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Dokumentarkiv" på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | www.edin.se | www.horbutiken.se / www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

