

Återförsäljare



EchoVibe
Digitalt väckarur med inbyggd vibrator

Bruksanvisning

EchoVibe (art nr 363010)



Z:\Products\Public\Telephones\Amplipower40\Swedish\Service\Amplipower40_DuSeA5V2_090626.indd Copyright © Bo EDIN AB

Innehållsförteckning

Inledning.....	sid	3
Översikt	sid	4
Delarna i förpackningen.....	sid	6
Före första användningen.....	sid	6
Tidsinställning.....	sid	6
Inställning av väckningstid.....	sid	7
<i>Somna om</i> -funktion	sid	7
Avstängning av larm.....	sid	7
Natt-/ficklampa.....	sid	7
Kuddklämma.....	sid	8
Skötsel och underhåll	sid	8
Garanti / felsökning.....	sid	8
Teknisk information	sid	8
Miljö och återvinning.....	sid	9

Tack för att Du har valt att köpa ett EchoVibe väckarur. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten. Vi rekommenderar att Du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.



Översikt



Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkten enligt gällande miljöföreskrifter. Bo EDIN AB är anslutna till REPA och El-kretsen. Om Du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar Du till en bättre miljö.

Natt-/ficklampa

I klockans botten finns det en lampa (11) som aktiveras genom att ställa aktiveringsknappen för lampan (13) i läge *ON (På)*. Klockan kan då användas som en liten ficklampa då den ej står i basstationen. Tryck på *snooze*-knappen (9) för att tända ficklampan.

Om klockan är placerad i basstationen fungerar den som nattlampa (14).

Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om enheterna skulle bli smutsiga, torka dem då med en lätt fuktad trasa.

Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte väckaruret där det utsätts för starkt solljus/värme eller fukt.

Var aktsam så att Du ej tappar väckaruret i golvet.

Garanti / felsökning

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Utsätt inte produkten för höga temperaturer.

Använd inte produkten med annan transformator än den som levereras med produkten.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.

Vänligen kontakta försäljningsstället eller Bo EDIN AB om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på www.edin.se. Vid behov kan annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

1. Digital display
2. Indikering larm aktiverat
3. Aktivering tidsinställning (*TIME*)
4. Inställning klockslag (*HOURL*)
5. Inställning klockslag (*MINUTE*)
6. Aktivering inställning väckningstid (*ALARM*)
7. Anslutning batteripack
8. Laddningsbart batteri NiMH 2/3AAA 3,6V 300mA
9. Snooze (repetition av larm, *somna om*-funktion) och aktivering av inbyggd natt-/ficklampa
10. Aktivering av larm (*ON-OFF – På-Av*)
11. Ficklampa
12. Basstation
13. Aktivering natt-/ficklampa
14. Nattlampa
15. Anslutning till nätadapter

Delarna i förpackningen

1. EchoVibe väckarklocka
2. NiMH 2/3AAA 3,6V laddningsbara batterier
3. EchoVibe basstation med inbyggd laddare
4. Nätadapter
5. Kuddklämma

Före första användningen

1. Placera basstationen så att den inte riskerar att ramla i golvet.
2. Anslut nätadaptern till vägguttaget och andra änden till uttaget på basstationen.
3. Placera klockan i basstationen. Displayen tänds upp och laddningen av batterierna påbörjas.

Batterierna skall laddas i 20-30 timmar före första användning!

Om ej, försvagas vibrationer och den digitala displayen.

OBS!

Använd aldrig standardbatterier i produkten då detta kan förstöra basstationen.

Tidsinställning

- Ta ur klockan ur basstationen och för skyddslocket på klockans framsida nedåt så att knapparna för tidsinställning blir synliga.
- Timmar: Håll nere tidsinställningsknappen (3) *TIME* samtidigt som du trycker på knappen (4) *HOUR* för att ställa in timtid.
- Minuter: Håll nere tidsinställningsknappen (3) *TIME* samtidigt som du trycker på knappen (5) *MIN* för att ställa in minuttid.

När klockan inte är placerad i basstationen visas tiden i displayen om du trycker ned *snooze*-knappen (9).

Inställning av väckningstid

Aktivera larmet genom att ställa in knappen (10) i läge *ON (På)*.

Timmar: Håll nere larminställningsknappen (6) *ALARM* samtidigt som du trycker på knappen (4) *HOUR* för att ställa in timtid.

Minuter: Håll nere larminställningsknappen (6) *ALARM* samtidigt som du trycker på knappen (5) *MINUTE* för att ställa in minuttid.

När klockan är placerad i basstationen och knappen för aktivering av larm (10) är inställd på *ON (På)* aktiveras klockans akustiska larm vid inställd tid för väckning.

När klockan är uttagen ur basstationen och knappen för aktivering av larm (10) är inställd på *ON (På)* aktiveras klockans inbyggda vibrator vid inställd tid för väckning.

Larmet stängs av genom att ställa knappen för aktivering av larm (10) i läge *OFF (Av)*.

Somna om-funktion

Om du trycker ned *snooze*-knappen (9) på ovansidan av klockan stängs larmet av och aktiveras igen efter 8-9 minuter. Knappen används också för aktivering av ficklampan (11) i botten av klockan.

Avstängning av larm

Ställ larminställningsknappen (10) i läge *OFF (AV)* för att stänga av larmet.

Kuddklämma

Kuddklämman fästes på klockan med hjälp av den medföljande kardborretejpen.