
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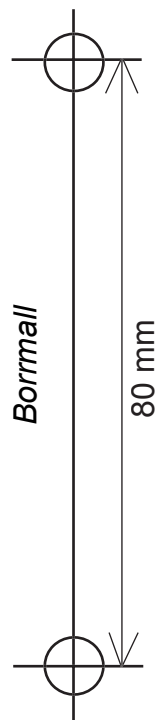


Återförsäljare



geemarc

CL100

Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

## Bruksanvisning

### CL100 (art nr 273010)

Bildöversikt.....	sid	2-3
Inledning.....	sid	4

### Installera telefonen


Ansluta telefonen.....	sid	5
Ställa in ringsignaler.....	sid	6
Ton-/pulsval .....	sid	6
Väggmontering.....	sid	7

### Använda telefonen

T-slinga.....	sid	8
Svara på inkommande samtal.....	sid	8
Volym- och tonkontroll (inkommande ljud).....	sid	8
Ringa ett samtal .....	sid	9
Justera utgående volym .....	sid	9
Återuppringning .....	sid	9
Återuppringning med knapparna med symbolerna * & #.....	sid	9
Sekretess.....	sid	9
Ställa in snabb- och kortnummer .....	sid	10
Ringa ett snabb- eller kortnummer.....	sid	10

### Övrigt

Om telefonen inte fungerar .....	sid	11
Skötsel och underhåll .....	sid	11
Teknisk information .....	sid	11
Miljö och återvinning.....	sid	11
Borrmall .....	sid	12

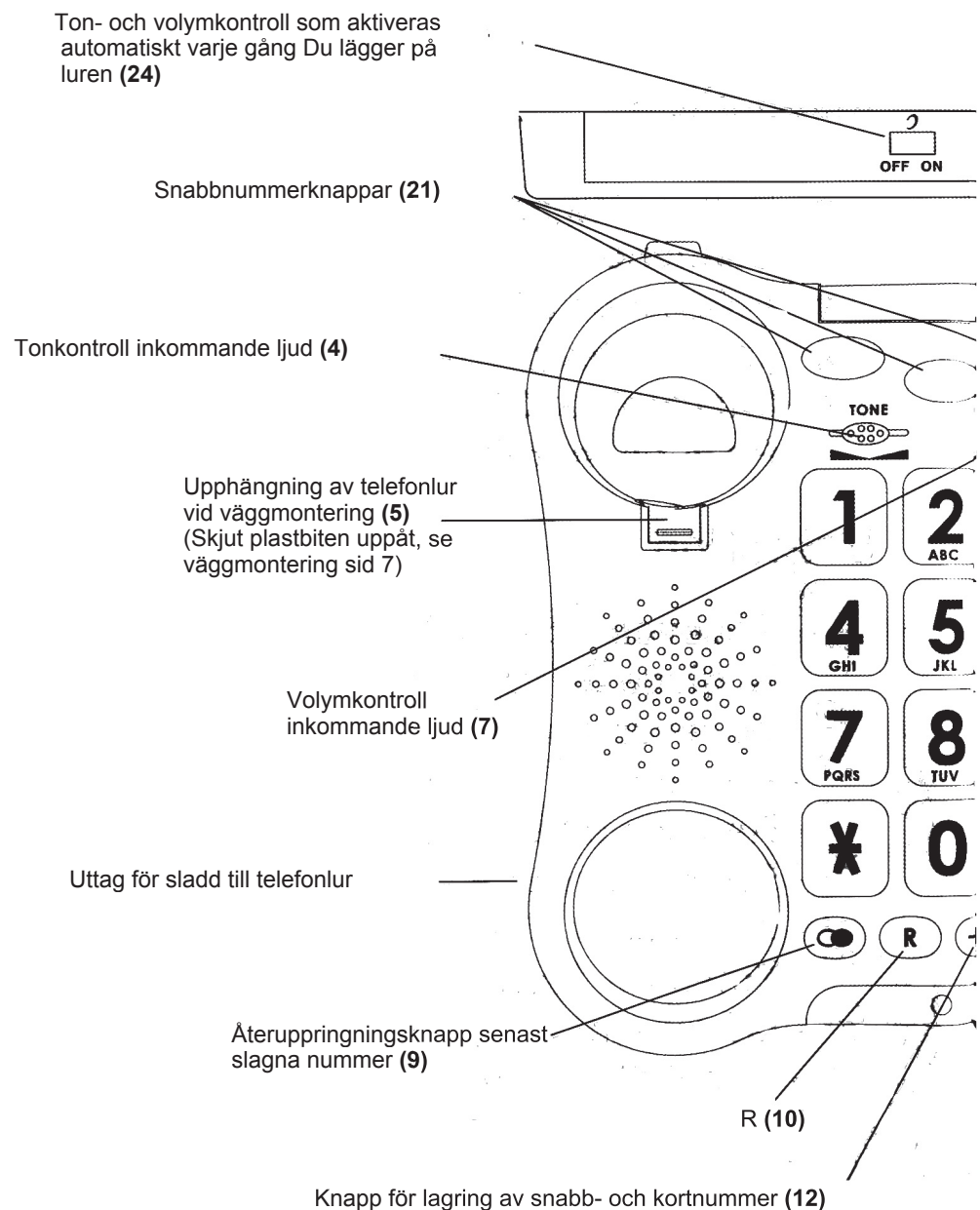

### Om telefonen inte fungerar

- Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefonlurens modularkontakter är ordentligt intryckta, annars finns det risk att den Du talar med inte hör vad Du säger. Testa genom att dra i sladden, den skall ej lossna.
- Kontrollera omkopplingsknapparna på undersidan av telefonen:
  - TBR omkopplaren (34) skall vara inställd på 100 (se sid 5 och 6)
  - Ton-/Pulsval (30) skall vara inställd på T (tonval) om telefonen är ansluten till en modern telefonstation (se sid 5).
- Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

### Skötsel och underhåll

Telefonen kräver normalt sett inget underhåll. Om telefonen skulle bli smutsig, torka då enheten med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

### Teknisk information

För teknisk information och gällande deklarerationer hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produkt databank" på [www.edin.se](http://www.edin.se).

### Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkten enligt gällande miljöföreskrifter. Bo EDIN AB är anslutna till REPA och EI-kretsen. Om Du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar Du till en bättre miljö.

## Ställa in snabb- och kortnummer

Telefonen kan lagra 12 telefonnummer varav 3 snabbnummer (max 21 siffror för varje telefonnummer).

De tre snabbnumren är extra lättåtkomliga genom de tydliga knapparna **P1**, **P2** och **P3** (21) på ovensidan av telefonen. Vi rekommenderar att Du ställer in dessa nummer när Du installerar telefonen. Dessa tre knappar lämpar sig utmärkt för att lägga in telefonnummer till t.ex. hemtjänsten, nödnummer etc.

Gör så här för att lagra snabb- och kortnummer:


- Lyft på luren.
- Tryck på knappen med symbolen →◇ (12).
- Välj och tryck på någon av knapparna **P1**, **P2**, **P3** (21) eller någon av knapparna **M1**, **M2**, ....., **M9** (16).
- Slå numret.
- Tryck på knappen med symbolen →◇ (12) igen.
- Numret är nu lagrat på den knapp Du valt.

Om Du kopplar ur telefonen försvinner de lagrade numren efter ett par timmar. Om Du vill ändra ett telefonnummer försvinner det gamla numret automatiskt när Du lägger in ett nytt telefonnummer enligt ovanstående beskrivning.

## Ringa ett snabb- eller kortnummer

Lyft på luren och tryck på någon av snabbknapparna **P1**, **P2**, **P3** (21) eller kortnummerknapparna **M1**, **M2**, ....., **M9** (16). Telefonen slår då det nummer som lagrats på respektive knapp.

Använd telefonregistret som finns under telefonen för att anteckna de lagrade numren.

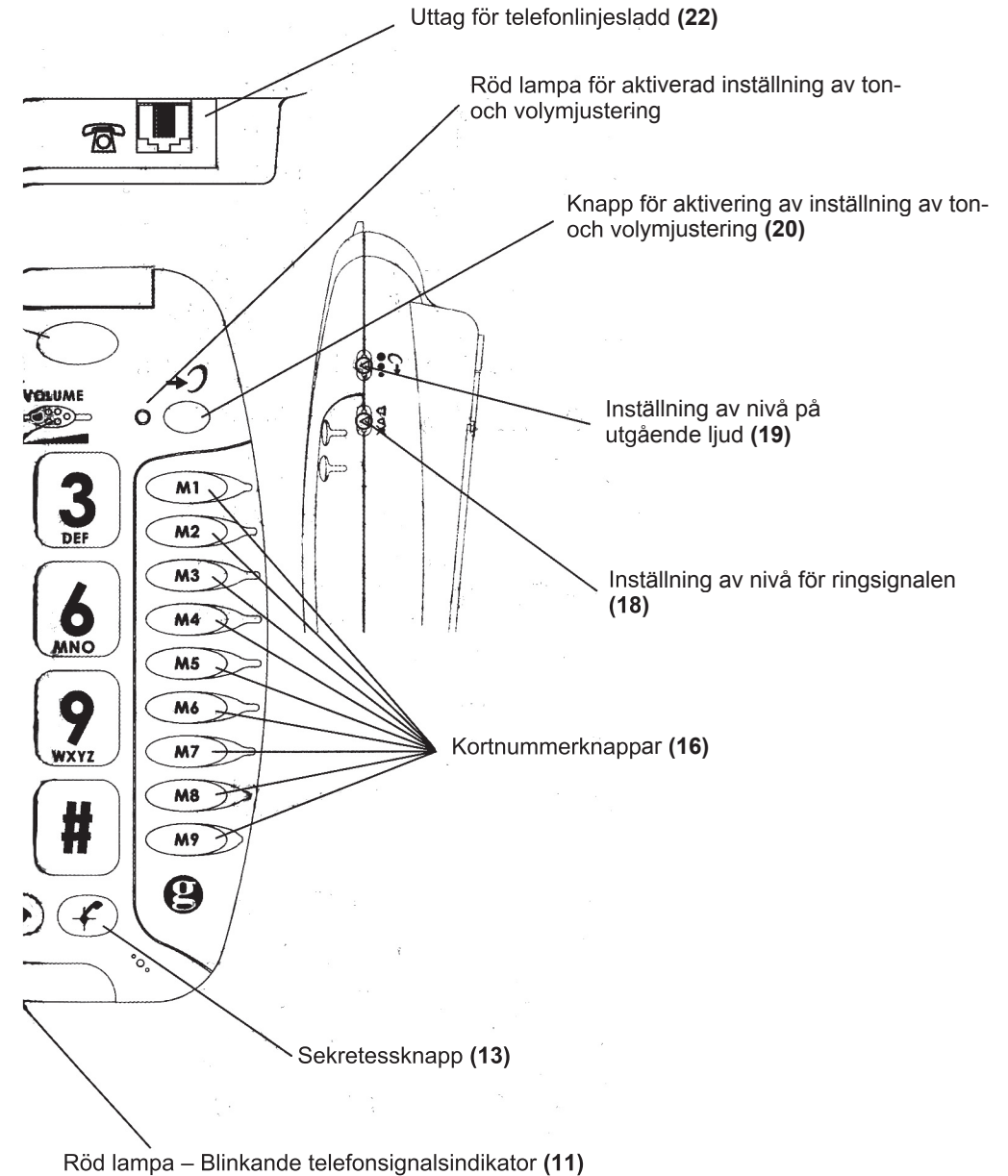

**Inledning**

Tack för att Du har valt att köpa en CL100 telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten.

**Varning!**

Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.

**OBS!**


För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftiga åskoväder.


**Ringa ett samtal**

Lyft på luren på vanligt sätt och slå önskat nummer. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.

**Justera utgående volym**

Om Du har en svag röst eller om den Du pratar med har svårt att uppfatta vad Du säger, kan Du öka utgående volym med omkopplingsknappen med nedanstående symbol (19). Vid behov kan den utgående volymen även sänkas.

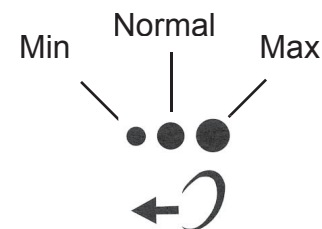
**Återuppringning**

Lyft på luren och tryck på knappen med symbolen  så slås det sen-aste telefonnumret automatiskt (fungerar ej för snabb- och kortnummer).

**Återuppringning med knapparna med symbolerna \* & #**

\* & # är serviceknapp som är avsedda för nyare, digitala växlar. Vänligen vänd Dig till Din telefonoperatör för ytterligare information.

**Sekretess**

Om Du vill säga något till en eller flera personer som befinner sig i samma rum som Du, men inte vill att den Du pratar med i telefonen skall uppfatta vad ni säger, håll nere knappen med symbolen  (13). Du hör vad den Du pratar med i telefonen säger, men denne kan inte höra vad Du säger så länge Du håller knappen nedtryckt. Släpp upp knappen för att återgå till normalt telefonsamtal.


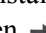
## T-slinga

Om Du använder hörapparat, ställ in hörapparaten på T (teleslinga) för att utnyttja den inbyggda teleslingan.

## Svara på inkommande samtal


När telefonen ringer, lyft på luren och svara på vanligt sätt. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.

## Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)


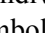
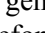
Du kan öka volymen och justera tonen på det inkommande ljudet efter Dina egna behov. Knappen med symbolen  (20) används för att aktivera/inaktivera inställningarna under samtalet. När inställningen är aktiverad lyser den röda lampan bredvid knappen med symbolen .


### Justera volym och ton

Kontrollera att den röda lampan bredvid knappen med symbolen  lyser. Justera ton och volym med knapparna **TONE** (4) och **VOLUME** (7).

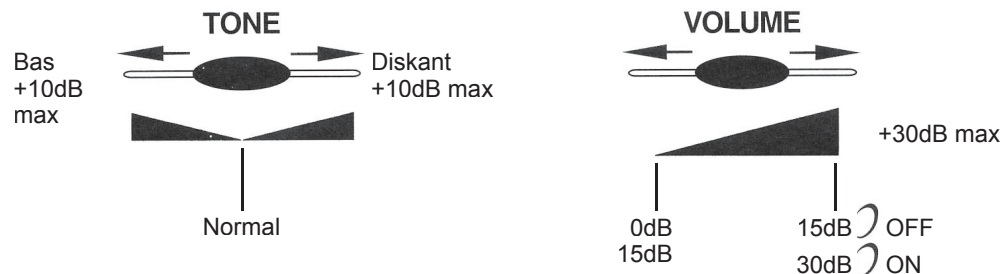

### OBS!

När omkopplingsknappen med symbolen  (24) är i läge **ON** (knappen sitter på baksidan av telefonen), aktiveras de individuella inställningarna varje gång någon använder telefonen. När symbolen  (24) är i läge **OFF**, måste de individuella inställningarna aktiveras genom att trycka på knappen med symbolen  (20) på ovasidan av telefonen.

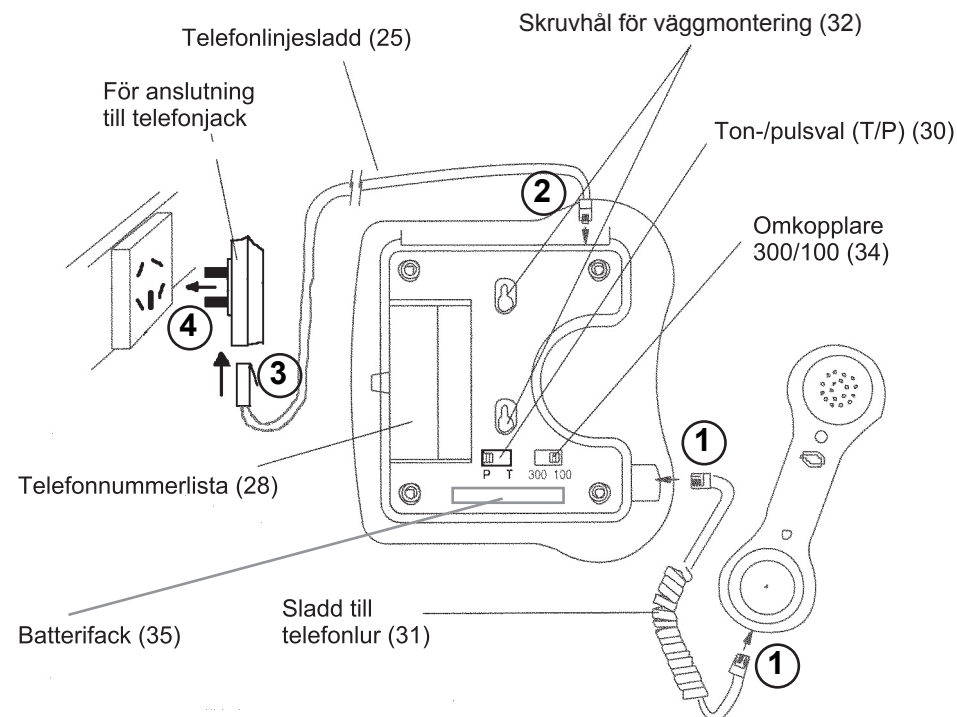




## Ansluta telefonen

1. Anslut telefonluren till telefonen (31).
2. Öppna batterifacket genom att lossa skruven som håller fast locket och dra locket mot dig (35).
3. Sätt in 4 st AAA 1,5V alkaline-batterier (ingår ej vid telefonköpet) i batterifacket. Batterierna behövs om du vill öka nivån på ringsignalen (ca 10dB).
4. Sätt tillbaka locket till batterifacket och skruva fast skruven.
5. Anslut telefonlinjesladden till telefonen (25).
6. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till telefonpluggen
7. Anslut telefonpluggen till telefonjacket.

### OBS!

Telefonpluggen skall sitta ytterst, ovanpå ev. annan utrustning såsom modem o.dyl.


## Ställa in ringsignaler

Ringsignalen kan ställas i tre lägen (avstängd - svag - stark) med knapp (18) på höger sida av telefonen:  : Off,  : Low,  : Hi

Telefonen levereras med ringsignalen ställd i läge "stark" och melodi nr 6.

	Svag	Medel	Stark
Melodi Nr 1	1	2	3
Melodi Nr 2	4	5	6 (fabriksinställning)
Melodi Nr 3	7	8	9

Om Du inte tycker om melodin kan Du välja en ny genom att göra följande:

- Lyft luren
- Tryck på knappen med symbolen  (12)
- Tryck på knappen med symbolen #
- Välj melodi genom att trycka på någon av knapparna nr 1-9

Den valda melodin aktiveras vid nästa inkommande samtal.

### OBS!

Nivån på ringsignalen ökas med ca 10dB när telefonen förses med batterier (se sid 4, Ansluta telefonen).

## Ton-/pulsval (T/P)

Ton-/pulsval (30) är fabriksinställd på tonval (T). Om Du inte får kopplingston när Du försöker ringa ut är telefonen förmodligen ansluten till en gammal telefonväxel. Om detta problem uppstår måste omkopplings-knappen ställas om till pulsval (P).

## TBR omkopplare

TBR omkopplaren (34) skall vara inställd på 100 ms (fabriksinställning), se sid 5.

## Väggmontering

Om Du vill hänga telefonen på väggen måste Du justera upphängningen av telefonluren.

Ta tag i den räfflade plastbiten som sitter på ovansidan av telefonen, under hördelen på telefonluren (5) och skjut den uppåt/från Dig. Vrid plastbiten 1/2 varv (fortfarande med den räfflade ytan uppåt) och skjut tillbaka den på sin plats. Genom att göra detta försäkras Du Dig om att luren ej ramlar ned då telefonen sitter på väggen.

Gör två hål i väggen på 80 mm avstånd (använd mallen på sid 11). Skruva in skruvarna (och ev. plugg). OBS! Skruva inte ända in, lämna ett avstånd på 6-7 mm från väggen. Häng upp telefonen på skruvhuvudena och dra telefonen nedåt för att säkra upphängningen.