


Återförsäljare

Bruksanvisning

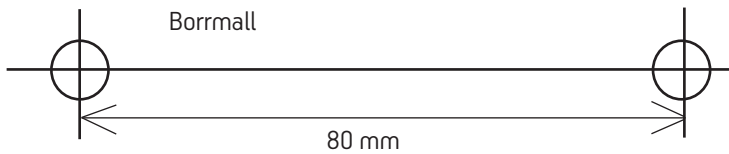

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | www.edin.se | www.horbutiken.se / www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965



AmpliPower 40, art nr 273040

Installera telefonen

Översikt	sid	4
Ansluta telefonen.....	sid	6
Batterier	sid	7
Ringsignaler.....	sid	7
Ställa in ringsignal	sid	8
Ton/pulsval	sid	8
Meddelande väntar.....	sid	9
Väggmontering	sid	9

Använda telefonen

T-slinga.....	sid	9
Svara på inkommande samtal.....	sid	10
Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)	sid	10
Ringa ett samtal.....	sid	11
Ringa med headset	sid	11
Ringa med handsfree / använda högtalaren	sid	11
Återuppringning	sid	11
Användning av knapparna med symbolerna * och #.....	sid	12
Sekretess.....	sid	12
Ställa in snabb- och kortnummer.....	sid	12
Ringa på ett snabb- och kortnummer	sid	13

Tillbehör

Telefonlur anpassad för personer med konduktivt hörseltapp	sid	14
Vibrator	sid	14
Headset.....	sid	14
Batterier	sid	14

Övrigt

Om telefonen inte fungerar.....	sid	15
Skötsel och underhåll	sid	15
Teknisk information	sid	15
Miljö och återvinning.....	sid	16
Borrmall	sid	16

Om telefonen inte fungerar

- Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefonlurens modularkontakter är ordentligt intryckta, annars finns det risk att den Du talar med inte hör vad Du säger. Testa genom att dra i sladden, den skall ej lossna.
- Kontrollera omkopplingsknapparna på undersidan av telefonen:
 - TBR (34) skall vara inställd på 100 (se sid 6 och 9).
 - Ton-/Pulsval (30) skall vara inställd på T (tonval) om telefonen är ansluten till en modern telefonstation (se sid 6 och 8).
- Du kan endast ändra ton och volym när den röda lampan bredvid knappen +40dB (20) på telefonens ovasida är tänd (se sid 5).
- Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska, se sid 3.

Skötsel och underhåll

Telefonen kräver normalt sett inget underhåll. Om telefonen skulle bli smutsig, torka då enheten med en lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte telefonen där den utsätts för starkt solljus/ värme eller fukt. Var aktsam så att Du ej tappar telefonen eller luren i golvet.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkten enligt gällande miljöföreskrifter. Bo EDIN AB är anslutna till REPA och El-kretsen. Om Du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar Du till en bättre miljö.



Telefonlur anpassad för konduktivt hörseltapp (art nr 273068)

Om Du har konduktivt hörseltapp kan Du komplettera telefonen med en specialanpassad telefonlur, **Direct Vibe®**. Placera luren framför/nedanför Ditt öra alternativt bakom Ditt öra för att hitta det läge som fungerar bäst för Dig. Om Du är fullt hörande kan denna lur användas som en vanlig telefonlur.

Vibrator (art nr 273062)

Telefonen kan kompletteras med en vibrator (7.), se sid 6. När det ringer aktiveras vibratorn automatiskt om telefonen är inställd på *ringsignal och vibrator* ((O)), se sid 4-7.

Headset (art nr 273065)

Telefonen kan kompletteras med headset med mikrofon (6.), se sid 6. Om headset används aktiveras högtalartelefonen och högtalarljudet (6), se sid 4, bör sättas på *svag*. Prata i mikrofonen på vanligt sätt.

Batterier (art nr 175106)

Batteri, alkaliskt, AAA/LR03 1,5V.

Inledning


Tack för att Du har valt att köpa en AmpliPOWER40 telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten. Vi rekommenderar att Du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.

Varning!

Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.

OBS!

För att minska risken för att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftiga åskoväder.

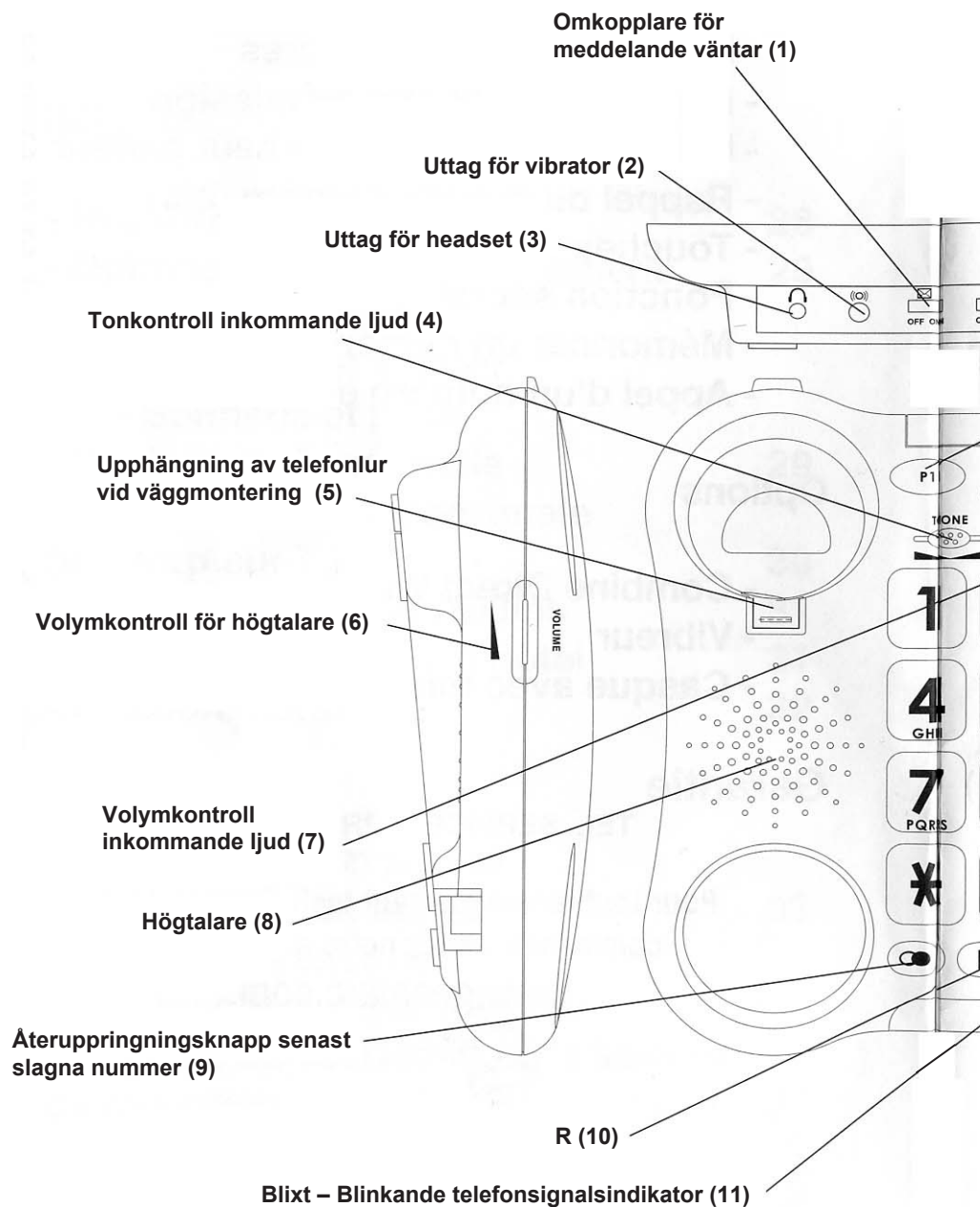

Ringa på ett snabb- eller kortnummer


Lyft på luren (eller använd högtalare/headset enligt beskrivningarna, se sid 11) och tryck på någon av snabbknapparna P1, P2, P3 (21) eller kortnummerknapparna M1, M2, ..., M9 (16). Telefonen slår då det nummer som lagrats på respektive knapp.

Använd telefonregistret som finns under telefonen för att anteckna de lagrade numren.

Användning av knapparna med symbolerna * och

* och # är serviceknappar som är avsedda för nyare, digitala växlar. Vänligen vänd Dig till Din telefonoperatör för ytterligare information.

Sekretess



Om Du vill säga något till en person bredvid Dig, men som Du inte vill att den Du talar med i telefonen skall uppfatta, håller Du nere knappen med symbolen  (13) nedtryckt. Du hör fortfarande vad personen Du talar med i telefonen säger, men denne kan inte höra vad Du säger. Släpp upp knappen för att återgå till normalt telefonsamtal.

Ställa in snabb- och kortnummer

Telefonen kan lagra 12 telefonnummer varav 3 snabbnummer (max 21 siffror för varje telefonnummer).


De 3 snabbnumren är extra lätt åtkomliga genom de tydliga knapparna P1, P2 och P3 (21) på ovensidan av telefonen. Vi rekommenderar att Du ställer in dessa nummer när Du installerar telefonen. Dessa tre knappar lämpar sig utmärkt för att lägga in telefonnummer till t.ex. hemtjänsten, nödnummer etc.

Gör så här för att lagra snabb- och kortnummer

- Lyft på luren (eller använd högtalare/headset enligt beskrivningarna, se sid 11)
- Tryck på knappen med symbolen  (12)
- Välj och tryck på någon av knapparna P1, P2, P3 (21) eller någon av knapparna M1, M2, ..., M9 (16)
- Slå numret
- Tryck på knappen med symbolen  igen
- Numret är nu lagrat på den knapp Du valt.


OBS!

Om Du kopplar ur telefonen försvinner de lagrade numren efter ett par timmar. Om Du vill ändra ett telefonnummer försvinner det gamla numret automatiskt när Du lägger in ett nytt telefonnummer enligt ovanstående beskrivning.

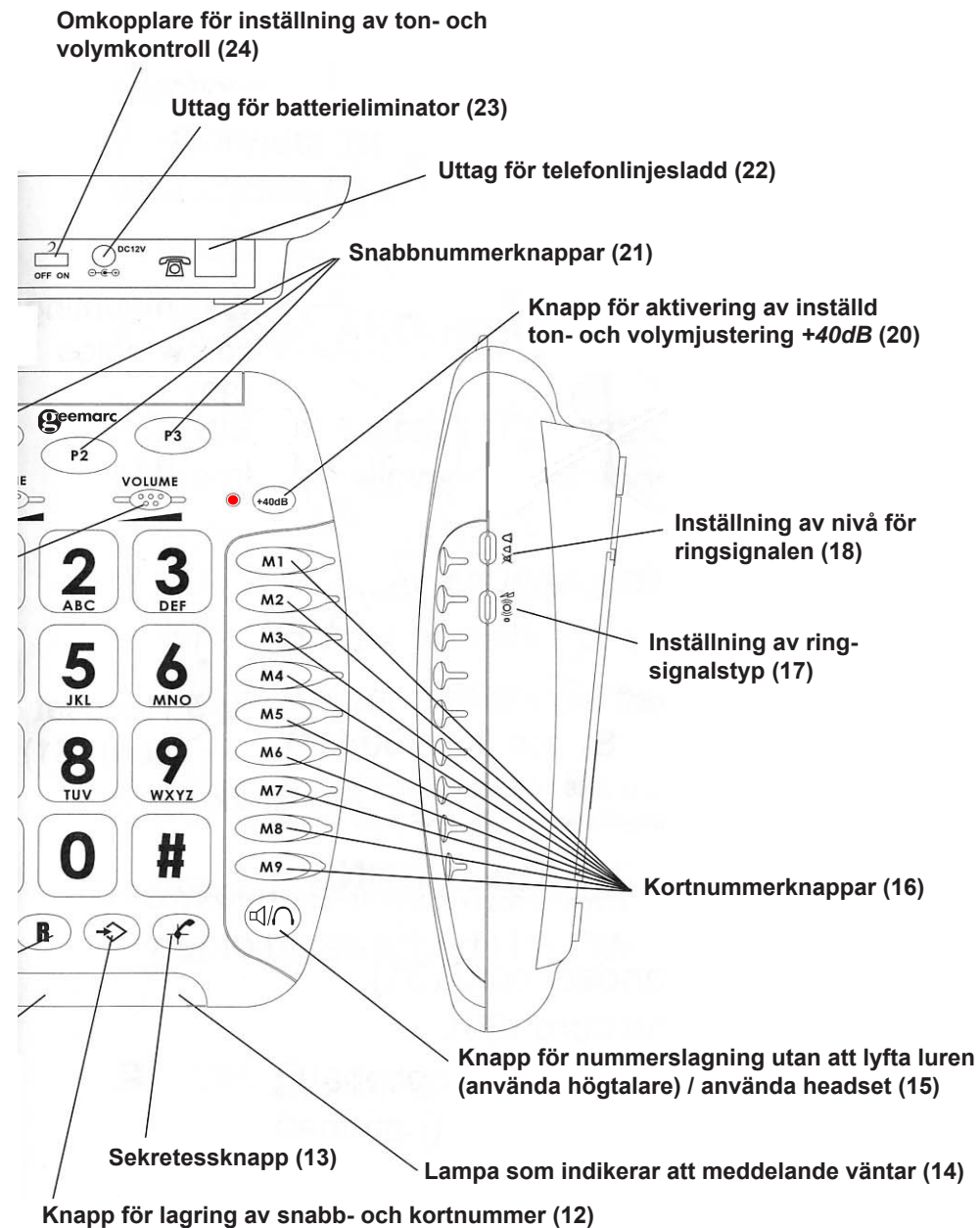

Ansluta telefonen

OBS! För att ringsignalen skall fungera även vid strömavbrott krävs 4 st AAA/LR03 alkaliska batterier.

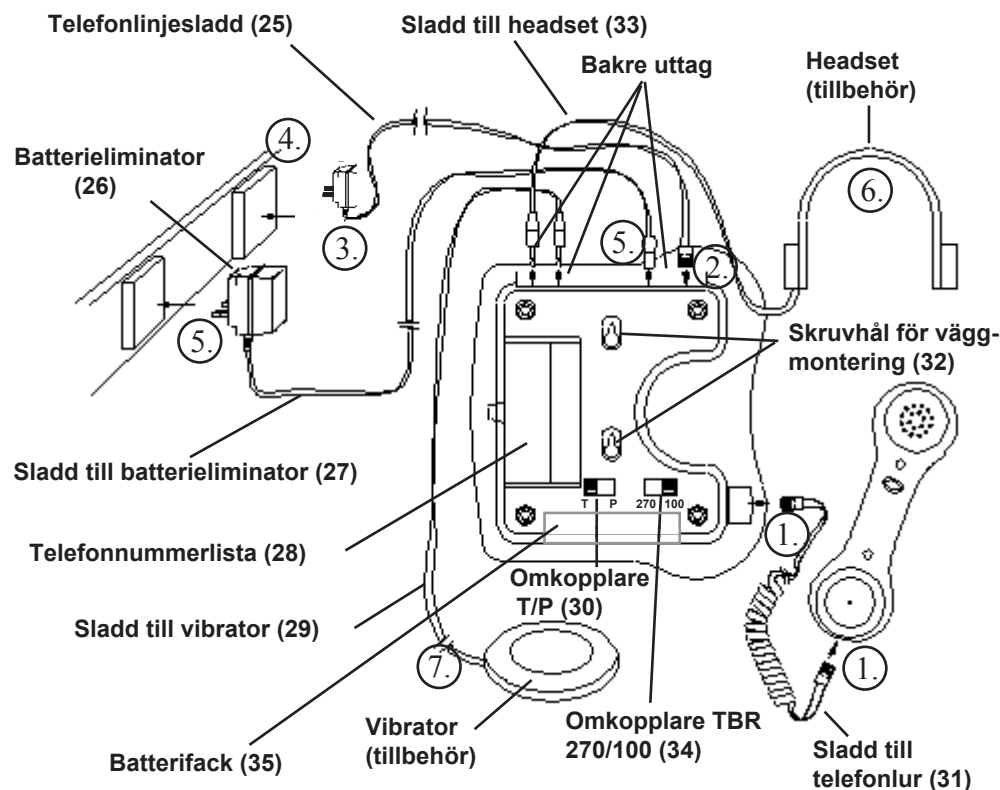

1. Anslut telefonluren till telefonen (31)
2. Anslut telefonlinjesladden (25) till telefonen
3. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till telefonpluggen (3)
4. Anslut telefonpluggen till telefonjacket (4)

OBS! Telefonpluggen skall sitta ytterst, ovanpå ev. annan utrustning såsom modem o.dyl.

5. Anslut batterieliminatören (26) till telefonen och vägguttaget.



Anslut eventuella tillbehör; headset (6), vibrator (7) till telefonen, se sid 4, 14.

Ringa ett samtal



Med telefonlur

1. Lyft på luren och slå önskat nummer.
2. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.



Med headset (tillbehör, se sid 14)

1. Tryck på knappen med symbolen  (15), se sid 5, och slå önskat nummer.
2. Tryck på knappen med symbolen  igen för att avsluta samtalet.


Ringa med headset

Tryck på knappen med symbolen  (15), se sid 5, och slå önskat nummer. Tryck på knappen med symbolen  om ingen svarar eller för att avsluta samtalet.


Ringa med handsfree / använd högtalaren

Tryck på knappen med symbolen  (15) för att aktivera högtalaren. Tala på vanligt sätt. Högtalarens volym kan justeras med volymknappen *VOLUME*, som sitter på vänster sida av telefonen, under samtalets gång. Tryck på knappen med symbolen  igen för att avsluta samtalet.

Lyft luren för att avaktivera handsfree funktionen under ett samtal.

Tryck på knappen med symbolen  (15) för att aktivera handsfree funktionen under pågående samtal, lägg på luren och fortsatt samtalet.

Återuppringning

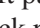

Lyft på luren (eller använd högtalare/headset enligt beskrivningarna ovan) och tryck på knappen med symbolen  (9) så slås det senaste telefonnumret automatiskt (fungerar ej för snabb- och kortnummer).

Svara på inkommande samtal

Med telefonlur

När telefonen ringer, lyft på luren. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.

Med headset (tillbehör, se sid 14)


När telefonen ringer och Du vill använda headset, tryck på knappen med symbolen  (15) för att svara. Tryck på knappen med symbolen  igen för att avsluta samtalet.

Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)



Du kan öka volymen och justera tonen på det inkommande ljudet efter Dina egna behov. Knappen *+40dB* (20), se sid 5, används för att aktivera/avaktivera inställningarna under samtalet. När inställningen är aktiverad lyser den röda lampan bredvid knappen *+40dB* (20).

Justera volym och ton

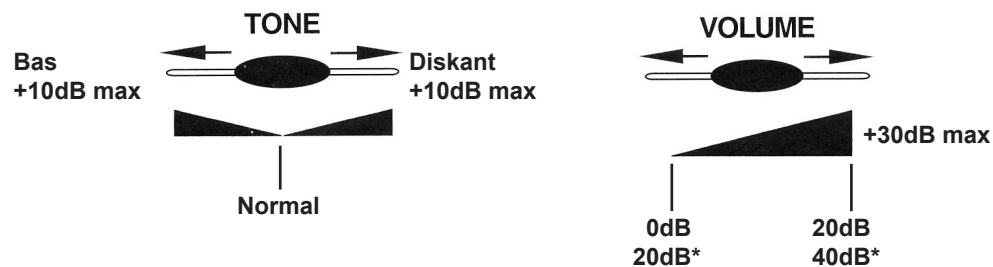Kontrollera att den röda lampan bredvid knappen *+40dB* (20) lyser. Justera ton och volym med knapparna *TONE* (4) och *VOLUME* (7).



OBS!

När omkopplingsknappen med symbolen  (24), som sitter upptill på telefonen, se sid 5, är i läge *ON* aktiveras de individuella inställningar Du gjort varje gång någon använder telefonen. När omkopplingsknappen med symbolen  är i läge *OFF*, måste de individuella inställningarna aktiveras genom att trycka på knappen *+40dB* (20) på framsidan av telefonen.

Batterier


För att ringsignalen skall fungera även vid strömavbrott krävs 4 st AAA/LR03 alkaliska batterier (ingår ej i telefonköpet).

OBS!

Ta först ur batterieliminatort från vägguttaget innan du sätter i batterierna.


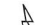
Öppna batterifacket (35) genom att försiktigt trycka upp "snäpplåset", t ex med en liten skruvmejsel. Sätt i batterierna och sätt tillbaka locket.

Läs mer om batterier i avsnittet *Tillbehör* under rubriken *Batterier*, sid 14.

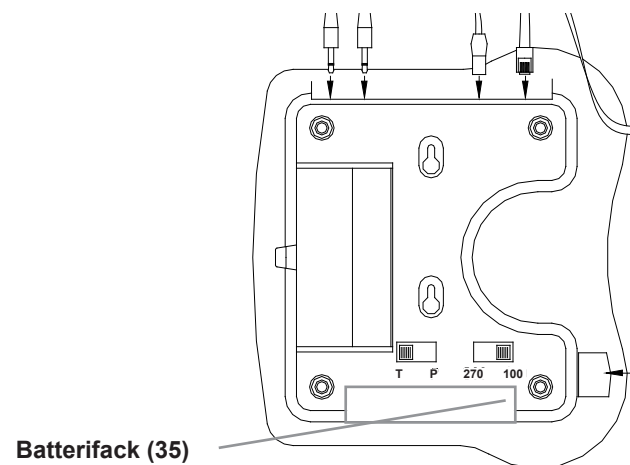

Ringsignaler - olika kombinationer

En omkopplingsknapp (17) finns på höger sida av telefonen. Med denna kan ringsignalen ställas in i 3 olika lägen:

- 0 Endast ringsignal
-  Ringsignal och vibrator (tillbehör)
-  Ringsignal och blyxtlampa

Ställa in ringsignalen


Ringsignalen kan ställas i 3 lägen (*avstängd - svag - stark*) med knapp (18) på höger sida av telefonen:



Telefonen levereras med ringsignalen ställd i läge *stark* och melodi nr 6.

	Svag	Medel	Stark	
Melodi Nr 1	1	2	3	
Melodi Nr 2	4	5	6	(fabriksinställning)
Melodi Nr 3	7	8	9	

Melodin kan ändras genom att göra följande:

- Lyft luren
- Tryck på knappen med symbolen  (12)
- Tryck på knappen med symbolen #
- Välj melodi genom att trycka på någon av knapparna Nr 1 till 9

Den valda melodin aktiveras vid nästa inkommande samtal.

OBS!

För att ringsignalen skall fungera även vid strömavbrott krävs 4 st AAA/LR03 alkaliska batterier (se sid 7).

Ton-/pulsval (T/P)

Ton-/pulsval (30), se sid 6, är fabriksinställd på tonval (T). Om Du inte får kopplingston när Du försöker ringa ut är telefonen förmodligen ansluten till en gammal telefonväxel. Om detta problem uppstår måste omkopplingsknappen ställas om till pulsval (P).

TBR

TBR (34), se sid 6, skall vara inställd på 100 ms (fabriksinställning).

Meddelande väntar

Denna funktion används då telefonen ansluts till exempelvis en modern hotellväxel.

En knapp med symbolen  (1) som sitter upptill på telefonen, se sid 4. Denna ställs i läge *ON* för att aktivera funktionen *meddelande väntar*.

Den röda lampan (14) som sitter i telefonsignalsindikatorn (11), se sid 4-5, tänds när Du har ett meddelande som väntar.

Väggmontering

Om Du vill hänga telefonen på väggen måste Du justera upphängningen av telefonluren.

Ta tag i lurfästet (5), se sid 4, som är en den lilla svarta plastbit som sitter i underkant av den översta fördjupningen för hördelen för telefonluren, och vrid den ett halvt varv. Detta gör att luren fästs på telefonen när den sitter på väggen.

Gör två hål i väggen på 80 mm avstånd (använd mallen på baksidan av denna Bruksanvisning). Skruva in skruvarna (och ev. plugg).

OBS!

Skruva inte skruvarna ända in, lämna ett avstånd på 6-7 mm från väggen. Häng upp telefonen på skruvhuvudena och dra telefonen nedåt för att säkra upphängningen.

T-slinga

Använd telefonen som en vanlig telefon. Telefonluren har en inbyggd slinga. Slingan är alltid aktiverad. Ställ in din hörapparat i T-läge för att stänga ute omkringliggande, störande ljud. Volym- och tonkontrollen ger även utslag i slingan.