

Bruksanvisning

BH06/BH08 (Art nr 277020)

Tack för att du har valt att köpa ett BH06/BH08 blåtands-set. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.



Innehållsförteckning	sida
Inledning	3
Grundläggande information	4
Ladda batterierna	5
Anslut halsslinga/hörlurar	6
Placering av halsslinga/hörlurar	6
Sätta på/stänga av	7
Volymkontroll	7
Ton/ljudupptagning	7
Använda halsslingan som samtalsförstärkare	7
Använda halsslingan med BH08	8
Aktivera ljudet från BH08	8
Koppla ihop halsslingan med mobiltelefon	8
Svara på samtal	10
Ringa ett samtal	10
Avsluta samtal	11
Avvisa samtal	11
Föra över samtal till och från mobiltelefonen	11
Samtal väntar	12
Sekretess	12
Lyssna på musik från mobiltelefonen	12
Pausa och stanna musik från mobiltelefonen	13
Söka låtar	13
Nödnummer	13
Extern mikrofon (tillbehör)	13
Koppla ljudkälla till BH08	14
Ihoppkoppling av halsslinga med BH08 och mobiltelefon	14
Avsluta trådlös överföring från BH08	14
Snabbguide kontrollampa	15
Felsökning	15
Tillbehör/reservdelar	16
Underhåll, skötsel och garanti	17
Service	17
Miljö	17
Anteckningar	18

Inledning

BH06/BH08 är ett blåtands-set med förstärkare som är framtagen för dig med nedsatt hörsel. Systemet har flera användningsområden:

- Samtal i mobiltelefon
- Trådlös överföring av ljud från TV/Radio eller annan ljudkälla
- Samtalsförstärkare
- Trådlös mikrofon för användning i sammanträden


Halsslingan används med hörapparaten ställd i T- eller MT-läge.

Observera att enheterna måste laddas för första användning. Laddningstiden är ca 2 timmar.

Förpackningen innehåller följande delar



- Förstärkare BH06 (stereo hearing enhancer)
- Batteriladdare

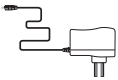

- Halsslinga
- Hörlurar



- Audiostreamer/mikrofon BH08 (extended ear)
- Audiosladd (till BH08)



Grundläggande information

Säkerhetsinformation


Inkorrekt användning med hörlurar/headset kan orsaka hörselskador. Var uppmärksam på följande:

1. Kontrollera att volymkontrollen är satt på lägsta nivå innan du ansluter hörlurar/headset.
2. Öka volymen försiktigt till dess att du hör bra.
3. Ha inte hörlurarna nära mikrofonen, då detta kan orsaka återkoppling/eko (ett skrikande ljud i hörlurarna).
4. Använd och förvara produkten så att inte barn eller personer som inte känner till produkten har åtkomst till den.


Före första användning

Innan du använder produkten för första gången är det viktigt att du laddar den fullt enligt instruktionen nedan.

Bildöversikt BH06

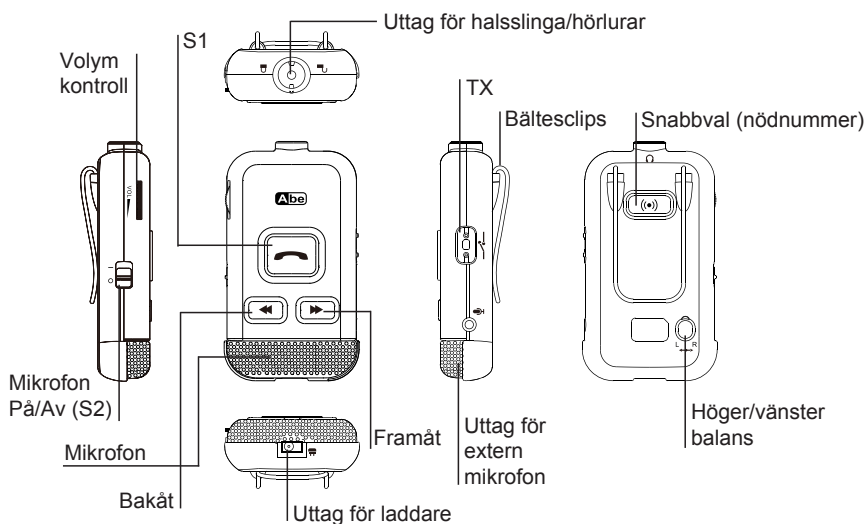

Bildöversikt BH08

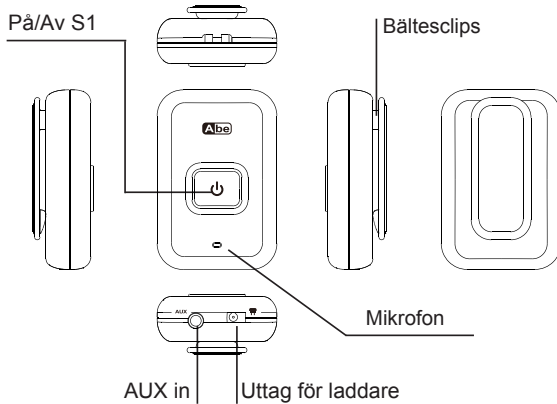

Ladda batterierna

Innan du använder halsslingan för första gången är det viktigt att du laddar den fullt. Anslut laddarens sladd enligt illustrationen nedan och anslut sedan laddaren till vägguttaget. Under laddning lyser kontrollampen med ett rött sken som släcks när batteriet är fulladdat. Samma sak gäller för BH08.

Tal- och standbytid kan variera beroende på hur den används och med vilken telefon den används.

Musiktid:	upp till 8,5 timmar
Mobiltid:	upp till 13,5 timmar
Samtalsförstärkare:	upp till 17 timmar
Standby:	upp till 200 timmar.

Lyssningstiden för BH08 upp till 14 timmar, standby upp till 250 timmar.

Observera att batteriets livslängd kan minska avsevärt om det lämnas oladdat under långa perioder. För att undvika försämrad livslängd bör du ladda batteriet minst en gång i månaden.


Låg batterinivå

När batterinivån är låg blinkar kontrollampen rött och ett kort ton hörs i slingan med jämna mellanrum. Det återstår ca 15 minuters taltid efter första varningen. När batteriet är helt urladdat stängs förstärkaren av.

Anslut halsslinga/hörlurar

Halsslingan är avsedd för hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-läge för att överföra ljudet direkt till hörapparaten. Häng halsslingan runt halsen och sätt fast förstärkaren i kläderna med hjälp av bältesclipset.

1. Anslut halsslingans/hörlurarnas kontakt till uttaget (se illustration)
2. Vrid kontakten medsols för att låsa kontakten
3. Vrid kontakten motsols för att låsa upp den

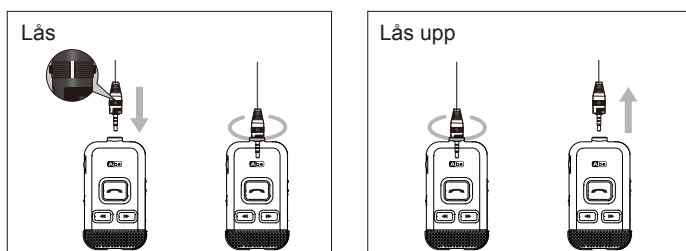

Placering av halsslinga/hörlurar

Det är viktigt att halsslingan/hörlurarna hänger så att mikrofonen är riktad mot din mun när du använder BH06 för samtal i mobiltelefon.

Om du använder den inbyggda mikrofonen för samtalsförstärkning är det viktigt att den riktas mot den du talar med.

Balans höger/vänster öra

Vid användning med hörlurar kan balansen justeras enligt dina önskemål för att uppnå bästa taluppfattbarhet. Ta bort gummipluggen (se illustration) och justera balansen med en skruvmejsel tills du uppnår en bra nivå för dig.

Sätta på/stänga av

Både halsslingan och BH08 sätts på och stängs av på samma sätt genom att trycka på S1 (se illustration):

Sätta på halsslingan/BH06

Halsslingan/BH06 sätts på genom att hålla S1 (se illustration) intryckt till kontrolllampan lyser med ett blått sken. När halsslingan är påslagen syns en blå blinkning var tredje sekund.

Stänga av halsslingan /BH06

Halsslingan/BH06 stängs av genom att hålla S1 (se illustration) intryckt till kontrolllampan släcks.

Volymkontroll

Volymen justeras genom att föra volymkontrollen uppåt (ökad volym) eller nedåt (minskad volym).

Ton/ljudupptagning

Vid mycket störande ljud i omgivningen kan man till viss mån anpassa BH06 ljudupptagning. Tryck en gång på höger, eller vänster, pil-knapp.

Använda halsslingan som samtalsförstärkare

Sätt på halsslingan genom att hålla svarsknappen (se illustration) intryckt till kontrolllampan lyser med ett blått sken. Sätt därefter på mikrofonförstärkaren genom att ställa S2 i läge I och stäng av den genom att ställa den i läge O. Detta läge används när du använder halsslingan som samtalsförstärkare eller om du ansluter en extern mikrofon till att ta upp ljud från t.ex. en TV-apparat eller annan ljudkälla.

Använda halsslingan med BH08

Halsslingan och BH08 är redan parade när du köper dem i ett set. Gör enligt nedan för att para ihop enheterna om du köpt dem separat.

1. Halsslingan skall vara påslagen.
2. Om BH08 är påslagen, men ej parad med någon enhet: Tryck in och håll nere TX-knappen tills kontrollampan blinkar rött och blått växelvis.
3. Om BH08 är avstängd: Tryck in och håll nere Av-/På-knappen tills kontrollampan blinkar rött och blått växelvis.
4. När enheterna parats ihop övergår kontrollampans sken till blått blinkande sken på båda enheterna. TX-knappen på halsslingan blinkar med ett grönt sken när länken är upprättad.
5. Tryck in och håll nere TX-knappen i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera länken när de är parade.

Aktivera ljudet från BH08

Tryck på TX-knappen när du vill stoppa sändningen av ljud från BH08. Tryck en gång till på TX-knappen för att återfå ljudet i halsslingan.

Koppla ihop halsslingan med mobiltelefon

För att upprätta en trådlös länk mellan halsslingan och mobiltelefonen måste halsslingan programmeras och paras ihop med mobiltelefonen. Detta sker trådlöst via blåtand och det är viktigt att enheterna befinner sig närmare än en meter från varandra.

1. Försäkra dig om att batterierna är fulladdade och att laddarens sladd ej är kopplad till förstärkaren.
2. Tryck på S1 när halsslingan är avstängd och håll den intryckt till kontrollampan blinkar växelvis rött och blått. Halsslingan är nu i ihopkopplingsläge.
3. Placera telefonen i närheten av halsslingan

4. Följ telefonens manual för aktivering och anslutning av blåtandsenheter. Detta sker vanligtvis via en inställningsmeny ("setup") eller anslutningsmeny ("connect") i telefonen där du väljer att finna/lägga till blåtandsenheter.
5. Hals slingan och telefonen söker nu kontakt (detta kan dröja flera sekunder).
6. Telefonen söker efter blåtandsenheter i närheten och listar dessa i displayen.
7. Välj enheten "Stereo Enhancer" för ihopkoppling.
8. Tryck inloggningskod 0000 för att godkänna ihopkopplingen. Vissa mobiltelefoner (Bluetooth 2.1) kräver ingen inloggningskod, utan ihopkopplingen sker automatiskt.
9. När ihopkopplingen är klar övergår kontrollampen till blått sken som blinkar varannan sekund.
10. Om ihopkopplingen misslyckas: Slå av hals slingan och telefonen och vänta i 10 sekunder, sätt på telefonen och hals slingan och börja om från början.

Observera!

Det skiljer sig mellan olika telefoner hur frågan ställs och hur man kopplar ihop blåtandsenheter med telefonen. På vissa telefoner måste man även etablera en blåtandslänk mellan hals slingan och telefonen efter att man kopplat ihop dem. Detta finns beskrivet i telefonens manual. Tryck ett kort tryck på S1 för att etablera länken. En fråga visas i displayen: "Accepterar du att Enhancer etablerar en länk med telefonen?" (frågan skiljer sig beroende på vilken telefon du har). Efter att du svarat ja på denna kan du använda hals slingan med telefonen.

Om slingan varit avstängd och du sätter på den igen kopplas den automatiskt ihop med den enhet den var parat med när den stängdes av.

Tryck kort på S1 om slingan skulle tappa kontakten med telefonen trots att den är påslagen för att återupprätta blåtandslänken.

Om du kommer utom räckvidd från telefonen letar hals slingan rätt på telefonen så snart du befinner dig inom räckvidd igen. Skulle du tala i

telefonen och går utom räckvidd bryts inte samtalet utan så fort du kommer tillräckligt nära telefonen återupptas samtalet.

Halsslingan kan bara vara parat med en blåtandsenhet åt gången, men det går att registrera upp till 8 enheter.

Svara på samtal

Svara med mikrofonförstärkare avstängd

När det ringer i telefonen hörs en ton i halsslingan och halsslingan vibrerar. Tryck på S1 för att besvara samtalet.

OBS!

En del telefoner sätter bluetooth i väntläge om du inte använt blåtandskopplingen på ett tag. När det kommer ett samtal ringer det först i telefonen och det tar ett par sekunder innan samtalet går över till slingan. **Det är viktigt att du väntar till signalen kommer över i halsslingan innan du svarar!** Om du trycker på S1 innan signalen går över uppfattar halsslingan det som om du vill etablera en blåtandslänk och samtalet går ej över till halsslingan.

Svara med mikrofonförstärkare aktiverad

När det ringer i telefonen hörs en ton i halsslingan och halsslingan vibrerar. Tryck på S1 för att besvara samtalet. Mikrofonförstärkaren stängs av automatiskt och sätts på igen när du avslutat samtalet.

Ringa ett samtal

När du ringer från din mobiltelefonen kopplas samtalet automatiskt över till slingan. Detta är dock beroende på telefonmodell och hur telefonen är inställd. Om din telefon inte har automatisk överkoppling till halsslingan, tryck ett kort tryck på svarsknappen för att koppla upp halsslingan mot mobiltelefonen.

Avsluta samtal

Tryck in S1 för att avsluta samtalet. Batteriindikatorn återgår till ett blått blinkande sken varannan sekund.

Avvisa samtal

Tryck och håll in ►►-knappen tills du hör en ton i slingan om du vill avvisa ett inkommande samtal. Telefonen måste vara ansluten till halsslingan och den ska vara i standby-läge.

Föra över samtal till och från mobiltelefonen

På vissa telefoner går att föra över ett samtal till och från mobiltelefonen under pågående samtal. Mer om detta kan läsas i telefonens bruksanvisning.

1. Tryck kort på S1 för att föra över ett samtal från mobiltelefonen till halsslingan.
2. Följ telefonens instruktioner för att föra över ett samtal från halsslingan till mobiltelefonen.

Om du har en mobiltelefon med musikspelare som stödjer A2DP kan du även lyssna på musik vi halsslingan.

Samtal väntar

Denna funktion är endast aktiv om du har ett SIM-kort som stödjer samtal väntar.

När du pratar i telefon (samtal 1) och någon ringer (samtal 2) hörs det en dubbelton i slingan och kontrollampans röda och blå sken lyser samtidigt.

- Tryck på ►►-knappen i ca 2 sekunder för att besvara samtal 2. Samtal 1 sätts då på vänt.
- ►►-knappen används för att växla mellan de båda samtalen.
- Tryck på S1 med ett kort tryck för att avsluta aktivt samtal.

Sekretess

Tryck in ◀-knappen under pågående samtal om du tillfälligt vill stänga av slingans mikrofon för att den du pratar med inte skall höra vad du säger. En ton hörs i slingan som bekräftelse på att mikrofonen är avstängd.

Gör på samma sätt för att aktivera mikrofonen igen.

Lyssna på musik från mobiltelefonen

För att lyssna på musik från mobiltelefonen i halsslingan måste telefonen stödja A2DP och AVRCP och vara ihopparad med halsslingan. Om du slagit på musiken i mobiltelefonen trycker du på S1 för att föra över musiken till halsslingan.

Tryck på S1 om telefonen ringer för att ta emot telefonsamtalet. När samtalet är avslutat får du tillbaka musiken i halsslingan.

Pausa och stanna musik från mobiltelefonen

Tryck på S1 för att pausa musiken i halsslingan och tryck på S1 igen för att fortsätta att lyssna på musiken. Tryck in och håll nere S1 för att stanna och avsluta överföringen av musik.

Söka låtar

Tryck på ▶-knappen för att hoppa till nästa låt och ◀-knappen för att repetera föregående låt.

Nödnummer

Halsslingan är utrustad med en snabbvals knapp. Denna knapp kan programmeras med valfritt nummer:

1. Lägg in telefonnumret i telefonboken i din mobiltelefon.
2. Sätt halsslingan i parningsläge (se sid 8).
3. Följ telefonens anvisningar hur man skickar telefonnumret till halsslingan via blåtand. (Det kan se ut på följande sätt: Markera telefonnumret och välj sedan ”sänd kontakt via blåtand”. Telefonen börjar söka och ”Stereo Enhancer” visas i displayen. Bekräfta överföringen av kontakten från mobiltelefonen till halsslingan genom att trycka på bekräfta.)
4. När överföringen är klar lämnar halsslingan parningsläge och går tillbaka i standbyläge.
5. Överfört nummer rings upp genom att trycka på SOS-knappen.

Observera att nödnumret endast fungerar om du befinner dig där telefonen har täckning.

Extern mikrofon (tillbehör)

Med en extern mikrofon (tillbehör) kan du använda halsslingan till att lyssna på TV/radio eller annan ljudkälla med högtalare.

1. Anslut mikrofonen till mikrofoningången
2. Placera mikrofonen i närheten av högtalaren

OBS!

Var försiktig så att inte sladden från mikrofonen utgör en snubbelrisk. Använd BH08 för trådlös överföring av ljud till halsslingan.

Koppla ljudkälla till BH08

Använd den medföljande audiosladden för att koppla TV/Radio eller annan ljudkälla till BH08. Anslut ena änden till AUX in på BH08 och den andra änden till ljudutgången på TV/Radio eller den ljudkälla du vill lyssna till.

Hur aktiverar man och använder den inbyggda mikrofonen i BH08?

Ihopkoppling av halsslinga med BH08 och mobiltelefon

När du kopplat ihop halsslingan både med BH08 och mobiltelefon kan du använda den som halsslinga till mobiltelefonen samtidigt som du använder halsslingan till att ta emot ljudet trådlöst från TV/Radio eller annan ljudkälla.

Tryck på S1 för att besvara samtal om någon ringer när du lyssnar på musik trådlöst via BH08. Musiken återupptas i halsslingan när du avslutat samtalet.

Avsluta trådlös överföring från BH08

Tryck in och håll nere TX-knappen på halsslingan för att avsluta överföringen av ljud från BH08. Den gröna TX-lampan slocknar. Tryck på TX-knappen till lampan lyser grön m du vill återgå till att lyssna på ljud som sänds från BH08.

Snabbguide kontrollampa

Indikering kontrollampa

2x1 sekunder, blått sken

1x2 sekunder, blått sken

Blinkande grönt sken

Blinkande rött sken

Fast rött sken

Slocknat rött sken

Rött/blått blinkande sken

Snabbt blinkande blått sken

Förklaring

Samtal/överföring av ljud pågår

Parad med och aktiv mot mobiltelefonen

Överföring av ljud från BH08 pågår

Låg batterinivå (max 15 minuters taltid återstår)

Laddning pågår

Batteriet är fulladdat

Redo för parning med mobiltelefon

Telefonen ringer

Felsökning

Det går ej att sätta på halsslingan/BH08

Kontrollera att batteriet är laddat.

Kontrolllampan lyser ej vid laddning

1. Kontrollera att laddaren är ordentligt isatt.
2. Kontrolllampan släcks när batteriet är fulladdat.

Inget ljud i halsslingan

1. Kontrollera att halsslingan/hörlurarna är ordentligt fastsatta.
2. Kontrollera att kontrolllampan ej lyser rött, ladda halsslingan.
3. Kontrollera att halsslingan är påslagen. (Kontrolllampan ska blinka med ett blått sken.)
4. Kontrollera att volym- och tonkontroll är korrekt inställda.
5. Kontrollera att den är korrekt parad med mobiltelefonen/ansluten till annan ljudkälla.
6. Ställ om den som samtalsförstärkare och skrapa på mikrofonen för att kontrollera om halsslingan är hel/ordentligt fastsatt.
7. Se till att halsslingan ligger rätt runt nacken och att hörapparaten är inställd i T/MT-läge.

Svagt ljud i halsslingan

1. Kontrollera att volym- och tonkontroll är korrekt inställda.
2. Kontrollera att kontrolllampan ej lyser rött, ladda halsslingan.
3. Kontrollera att mobiltelefonens volymkontroll är korrekt inställd/att ljudet är påslaget på alternativ ljudkälla.

Ljudet i halsslingan försvinner

Om du befinner dig för långt från telefonen/BH08 försvinner ljudet i halsslingan. Det kommer tillbaka när du befinner dig inom räckhåll igen.

forts.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Vänligen kontakta försäljningsstället om halsslingan trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Tillbehör/reservdelar

Artikelnr	Beskrivning
276928	Laddare BH01
276946	Halsslinga med mikrofon
276950	Hörlurar med mikrofon
276962	12V laddare
276963	Batteripack
276964	Extern mikrofon

Underhåll, skötsel och garanti

Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheterna skulle bli smutsiga, torka då dem med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Ställ inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Utsätt inte produkten för höga temperaturer.

Använd inte produkten med annan transformator än den som levereras med produkten.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.

Service

Om produkten trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna den till försäljningsstället eller sända den till Bo EDIN AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö. Bifoga ifyllt returblankett (pdf), som finns att ladda ned på www.edin.se på Support, eller märk godset med ert namn, adress och telefon samt bifoga kvitto eller faktura.

Miljö

Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo EDIN AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Anteckningar

Återförsäljare:

