



UniVox® DLS-30/DLS-30TV

Slingförstärkare med kudde/soffslinga och autoscart

Bruksanvisning

UniVox® DLS-30/DLS-30TV (art nr 203010/12/40/42)

Tack för att du har valt att köpa en UniVox® produkt. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. UniVox® DLS-30/DLS-30TV är ett komplett slingförstärkarpaket för TV och annat ljudlyssnande för hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-läge. Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.

RCA-kabel ingår i:
203012
203042



UniVox® DLS-30/DLS-30TV slingförstärkare



Slingkudde

Ingår i:
203010
203012
203040
203042



Soffslinga

Ingår i:
203010S
203040S



Batterieliminators

Inledning

UniVox® DLS-30/DLS-30TV har automatisk omkoppling och anslutning till TV via scart och 2 st extra ingångar som kan anslutas till externa mikrofoner eller andra ljudkällor som radio eller MP3-spelare. Modellen DLS-30TV kan kompensera för det tidsfel i ljudet som ”platta” TV-apparater relativt ofta har.

Förpackningen med DLS-30/DLS-30TV innehåller följande delar:

- Slingförstärkare med automatisk scartkontakt
- Slingkudde/soffslinga
- Batterieliminators


I förpackningen finns också dubbelhäftande tejp, för att fästa DLS-30/DLS-30TV på baksidan av TV-n. Börja med att packa upp delarna, se nedan.

Kontrollera före inkoppling med SCART


Se först till att TV-n fungerar som den ska tillsammans med video/DVD/digitalbox/satellitmottagare. De apparater som kopplas till TV-n ska vara seriekopplade (se ex. nedan). Om det finns flera scartuttag på TV-n ska scartuttag nr 1 användas. Den mittersta ljudkällan/-orna måste ha två scartuttag.

Vid korrekt ihopkoppling ska bild och ljud i TV-n automatiskt ändras till den ljudkälla du valt. Oavsett vad du vill lyssna på (video, DVD etc.) så ändras ljud och bild i TV-n till ljud och bild från den apparat du valt.


Seriekoppling TV / satellit / digitalbox / video med SCART

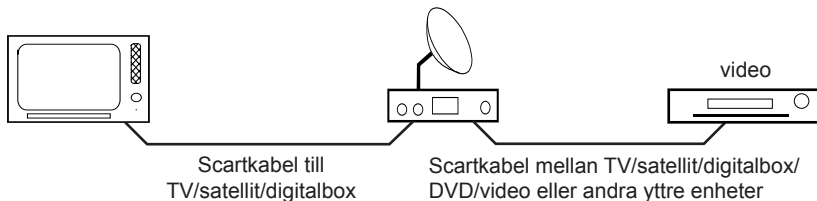

Seriekoppling TV / DLS-30/DLS-30TV / satellit / digitalbox / video med SCART

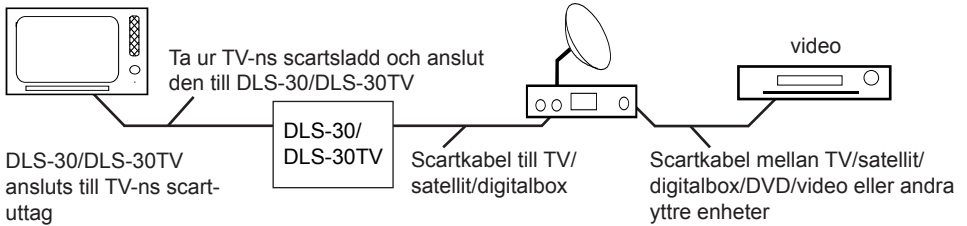

Koppla in UniVox® DLS-30/DLS-30TV

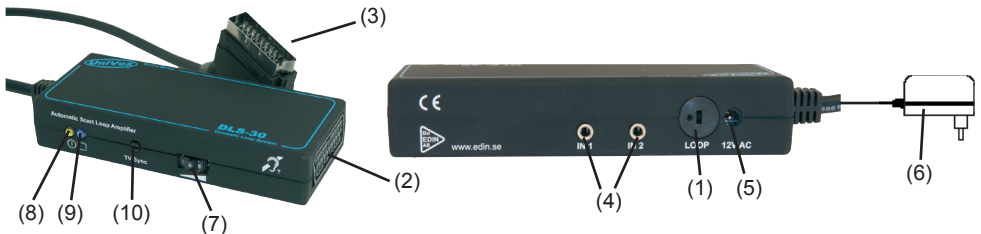

1. Placera slingkudden/soffslingan där du brukar sitta och se på TV. Slingkudden kan läggas antingen på eller under sittdynan i fåtöljen. Soffslingan kan placeras runt soffan/under mattan.
2. Lägg slingkuddens/soffslingans sladd utmed väggen eller under en matta så att den når fram till förstärkaren, som bör placeras bakom TV-n. Förlängningssladd finns som tillbehör. Tänk på snubbelrisken!
3. Anslut slingkuddens/soffslingans kontakt till uttaget (1) på DLS-30/DLS-30TV.
4. Ta ut scartkontakten från TV-n om du anslutit DVD/video el. dyl. och anslut den till scartuttaget (2) på kortsidan av DLS-30/DLS-30TV.
5. Anslut DLS-30/DLS-30TVs scartkontakt (3) till TV-ns scart 1-uttag.
6. Om TV-n saknar scartuttag, anslut en sladd, t. ex. RCA-kable, från TV-ns audioutgång till valfri IN-ingång (4) på DLS-30/DLS-30TV.

forts. nästa sida

7. Ett tredje sätt att få ut TV-ns ljud till DLS-30/DLS-30TV är att koppla in elektretmikrofon 13A till valfri IN-ingång (4). Mikrofonen fäster du på TV-ns högtalare. Oavsett ljudkälla kommer då rätt ljud ut på slingan.
8. Anslut batterieliminatorn till förstärkarens uttag märkt "12V AC" (5).
9. Anslut batterieliminatorn (6) till vägguttaget. Den blå lampan (9) lyser upp med ett fast sken en kort stund (se vidare nedan under rubriken indikeringslampor).
10. Om ljud och bild inte är synkroniserade så kan du justera detta med kontrollen "TV sync" (10). Denna finns enbart på DLS-30TV.

Om du vill kan du sätta fast förstärkaren på baksidan av TV:n med hjälp av den dubbelsidiga tejen som följer med i förpackningen.

Ställ hörapparaten i T- eller MT-läge när du tittar på TV.

Justera ljudnivå

Vid behov kan du justera ljudnivån med nivåkontrollen (7) på framsidan av förstärkaren. Detta behöver du normalt bara göra en gång eftersom DLS-30/DLS-30TV är försedd med automatisk volymkontroll. Reklamslag kan ibland låta högre vilket är helt normalt.

Indikeringslampor

Indikeringslampor för strömförsörjning (gul lampa, 8) och slinga (blå lampa, 9) finns på framsidan av förstärkaren. Den gula lampan visar att det finns ström till DLS-30/DLS-30TV och den blå visar att slingan fungerar (blinker i takt med ljudkällan).

Tillbehör/reservdelar

Slingkudde (art nr 283002)

Slingkudde, tunn 400x400x5mm, grå, 10m sladd

Fodral till slingkudde (art nr 283005)

Fodral till tunn slingkudde, 440x440x25mm, beige

Förlängningsladd (art nr 283210)

Förlängningsladd för slingkudde/soffslinga, 10m

Mikrofon 13A (art nr 242401)

Mikrofon med kardborrefäste, 1,8m sladd

Soffslinga (art nr 283220)

Soffslinga, 8m sladd och 10m förlängningsladd

Audiosladd (art nr 281015)

Audiosladd för koppling till stereo, 3,5mm till 2xRCA, kabel 1,5m

Underhåll och skötsel

UniVox® DLS-30/DLS-30TV kräver normalt inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

1. Kontrollera först att den gula strömförsörjningslampan (8) lyser. Om den inte lyser, kontrollera att batterieliminatoren sitter i nätuttaget.
2. Kontrollera att den blå slinglampan (9) blinkar i takt med ljudet från ljudkällan. Om inte: kontrollera att nivåkontrollen (7) är uppskruvad, slingkudden/soffslingan är ansluten (1), ljudkällan är ansluten (3). Lyser ändå inte den blå slinglampan kan slingkabeln vara trasig.
3. Glöm inte att sätta hörapparaten i T- eller MT-läge. Om lamporna lyser som de ska, kan det vara fel på hörapparaten.

Observera även att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Service

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo EDIN AB, se adress på sista sidan. Märk godset med ert namn, adress och telefonnummer, bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

UniVox® DLS-30/DLS-30TV uppfyller normer och krav i den internationella standarden IEC 60118-4:2006. För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produkt databank” på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk information beställas via support@edin.se.

Miljö

UniVox® DLS-30/DLS-30TV är vår första helt blyfria förstärkare, därför har den fått beteckningen Enviro Series.

Bo EDIN AB är anslutna till REPA och EI-kretsen. Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Anteckningar

Återförsäljare:



Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörselprodukter. Företaget grundades 1965 och i dag består produktsortimentet av både egenutvecklade produkter (UniVox®) och produkter från andra företag. För att säkerställa en hög kvalitet genomgår alla produkter noggranna tester. Ca hälften av försäljningen går på export.

Bo EDIN AB

Stockby Hantverksby 3
181 75 LIDINGÖ

Gatuadress

Förrådsvägen 2 B
181 41 LIDINGÖ

Telefon

08-7671818

Telefax

08-7671820

E-post

info@edin.se

Hemsida

www.edin.se